

## A-Cerumen spray 40 ml



Cena: 26,60 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	A-CERUMEN
Opakowanie	40 ml
Postać	Spray
Producent	GLENMARK DISTRIBUTORS
Przeznaczenie	Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 miesiąca życia

### Opis produktu

#### Opis

Preparat medyczny **A-Cerumen** to łagodny środek przeznaczony do higieny uszu. Zawiera surfaktanty, które rozpuszczają nagromadzoną woskowinę i zapobiegają jej powstawaniu. Nadaje się do regularnego stosowania w celu usuwania woskowiny oraz zapobiegania jej gromadzeniu się w uchu, a także do rozpuszczania korków woskowinowych. Może być stosowany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Dzięki specjalnemu aplikatorowi, preparat jest rozpylany równomiernie, delikatnie i bezpiecznie, nie generując nadmiernego ciśnienia.

#### Składniki

Łagodne substancje powierzchniowo czynne (sodu acylosarkozynian i ester sacharozy), substancja nawilżająca, barwnik pochodzenia roślinnego, substancje pomocnicze q.s. 100%.

#### Zastosowanie

- Usuwanie złożeń woskowiny usznej i zapobieganie powstawaniu korków woskowinowych.
- Preparat do higieny uszu dla dorosłych i dla dzieci po 6 miesiącu życia.

#### Sposób użycia

- Regularna higiena uszu: stosuj 2 razy w tygodniu.
- Nagromadzenie złożeń woskowinowych: stosuj rano i wieczorem przez 3 do kolejnych 4 dni.
- Przechyl głowę na bok, aby preparat nie wypłynął z ucha od razu po zastosowaniu.
- Zaaplikuj jedną dawkę preparatu do ucha i odczekaj około 1 minuty. Pochylić głowę do tyłu umożliwiając wypłynięcie produktu wraz z wydzieliną.
- Powtórz czynności w drugim uchu.



### Przeciwwskazania

- Nie stosować preparatu w przypadku perforacji błony bębenkowej, infekcji uszu lub gdy pacjent ma założony drenaż.
- Nie połykać.

### Ostrzeżenia

- Aby uniknąć podrażnienia, nie należy wprowadzać dozownika zbyt głęboko do przewodu słuchowego zewnętrznego.
- W przypadku bolesności ucha zasięgnąć porady lekarza.
- Unikać kontaktu z oczami.
- Po każdym użyciu, zdjąć końcówkę aplikatora i umyć ją ciepłą wodą.
- Zużyć w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego otwarcia.
- Przechowywać w temperaturze 10-40oC.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Producent

LABORATOIRES GILBERT  
928 Avenue du général de Gaulle, Francja  
Hérouville Saint-Clair