

Accu-Chek FastClix AST nasadka do nakłuwacza



Cena: 45,49 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ACCU-CHEK
Opakowanie	1 sztuka
Producent	ROCHE DIAGNOSTICS
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Accu-Chek FastClix AST to nasadka przeznaczona do użytkowania z nakłuwaczem Accu-Chek FastClix AST Kit.

Nakłuwacz Accu-Chek wyposażony jest w nasadkę, dzięki której można wykonać wkłucie w miejscach alternatywnych dla opuszka palca. Ta metoda, zwana AST, umożliwi pobranie próbki krwi do samodzielnego badania poziomu glukozy we krwi. Accu-Chek FastClix AST jest łatwy i szybki w użyciu i pomoże osobom mającym trudności z pobieraniem krwi z opuszka palca, szczególnie tym, którzy wykonują pomiary kilka razy dziennie. Alternatywne miejsca, w których można wykonać nakłucie, to dłoń, przedramię, ramię, udo lub tydka.

Działanie

Służy do pobierania krwi z alternatywnych części ciała.

Sposób użycia

- Zdjąć czarną nasadkę z nakłuwacza.
- Nałożyć szarą nasadkę AST. Znajdujące się na krawędzi nasadki wgłębienie oraz wyprofilowanie ze wskaźnikiem głębokości nakłucia (srebrny pasek) muszą się przy tym zazębić. Nasadka musi wyraźnie i wyczuwalnie "zaskoczyć" na swoje miejsce.
- Obracać nasadkę AST do momentu ustawienia na wskaźniku pożądanej głębokości nakłucia
- W celu otrzymania wystarczająco dużej kropli krwi nakłucie w alternatywnych częściach ciała musi być głębsze niż na opuszcze palca. ogólnie rzecz biorąc miejsc ate są mniej wrażliwe na ból.
- Wybrać miękkie miejsce i przemyć je ciepłą wodą z mydłem. Pozostawić skórę do dokładnego wyschnięcia.
- Nakłuwacza należy używać wyłącznie z osadzoną nasadką AST. Bez nasadki lancet wbija się zbyt głęboko, co powoduje powstanie bolesnego ukłucia.
- Mocno docisnąć nakłuwacz do wybranego miejsca nakłucia.
- Wcisnąć do oporu przycisk spustowy. Powoduje to uruchomienie lancetu i nakłucie skóry.
- Zdjąć nakłuwacz z miejsca nakłucia.
- Następnie zdjąć z nakłuwacza nasadkę AST.



- Przycisnąć nasadkę AST do miejsca nakłucia. Otwór w nasadce AST należy umiejscowić na skórze w tym samym miejscu, jak podczas nakłucia. Tylko w ten sposób można uzyskać kroplę krwi o odpowiedniej wielkości oraz zapobiec kontaktowi nasadki AST z krwią.
- Przeprowadzić pomiar stężenia glukozy we krwi według instrukcji obsługi posiadanego glukometru.
- Ponownie założyć na nakłuwacz jedną z dwóch nasadek.

Dodatkowe informacje

Parametry techniczne nasadka Accu-Chek FastClix AST:

- nakładka wykorzystuje metodę AST - umożliwia wykonywanie nakłucia w miejscach alternatywnych, takich jak: dłoń, przedramię, ramię, udo lub łydka
- nasadka jest kompatybilna ze nakłuwaczem: Accu-Chek FastClix AST Kit