

# Acerbi Sprawdź Kleszcza, test do wykrywania bakterii boreliozy u kleszcza i przyrząd do usuwania kleszczy, 1 sztuka

Cena: 45,23 zł



## Opis słownikowy

|                 |   |
|-----------------|---|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                   |
| Opakowanie      | 1 sztuka  |
| Postać          | przyrząd  |
| Producent       | ACERBIPHARMA SP. Z O.O.                                 |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny, Akcesoria                               |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

Produkt medyczny w formie testu diagnostycznego, przeznaczony do użytku w warunkach domowych, służy do samodzielnego sprawdzenia, czy usunięty ze skóry kleszcz jest zainfekowany bakteriami boreliozy. Test pozwala na wykrycie obecności bakterii *B. garinii*, *B. afzelii*, *B. burgdorferi* i *B. spielmanii*.

### Stosowanie

Małe i średnie kleszcze (< 8 mm):

1. Umieść kleszcza w probówce i dodaj 3 krople odczynnika.
2. Rozgnieć kleszcza za pomocą ostrej strony patyczka, rozgniataj go aż do odbarwienia się płynu.
3. Za pomocą pipety pobierz płyn (bez cząstek kleszcza) i nanieś 3 krople na dołek na płytce.
4. Odczekaj 10 minut i sprawdź wynik.

Duże kleszcze (> 8 mm):

1. Umieść kleszcza w probówce.
2. Zmiażdż kleszcza za pomocą ostrej strony patyczka.
3. Za pomocą pipety pobierz powstały płyn (bez cząstek kleszcza) i nanieś 1 kroplę na dołek na płytce.
4. Odczekaj kilka sekund i nanieś na dołek 2 krople odczynnika.
5. Odczekaj 10 minut i sprawdź wynik.

### Zastosowanie

- Szybkie i bezpośrednie wykrywanie bakterii boreliozy u kleszcza.
- Samodzielne i bezpieczne usuwanie kleszczy żerujących na skórze.

### Ostrzeżenia

- Zestaw służy wyłącznie do badania kleszczy.
- Test przeznaczony jest do jednorazowego użytku.
- Nie używaj testu po upływie daty ważności.
- Jeżeli torebka foliowa z testem płytkowym jest uszkodzona lub nie jest szczelnie zamknięta, nie wykonuj testu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych elementów testowych podanych w zestawie.
- Zużyj kasetę testową w ciągu 60 minut po otwarciu.
- Nie zamrażaj.
- Wyrób medyczny przechowuj w sposób niedostępny dla dzieci.

### Ważne wskazówki

- Wyrób medyczny Sprawdź Kleszcza przechowuj w temperaturze od 2 do 30 ° C, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Torebkę z testem płytkowym należy otworzyć bezpośrednio przed wykonaniem testu.
- Bakterie boreliozy znajdują się w okrężnicy kleszcza – musi on zostać dokładnie zmiażdżony patyczkiem.
- Kasetę testową w czasie badania musi znajdować się na gładkiej powierzchni w pozycji poziomej.
- Drewniany patyczek służy wyłącznie do rozgniatacia kleszcza w próbówce.
- Do przeprowadzenia testu niezbędny jest zegarek lub stoper.
- Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować tak, jak z odpadkami.

### Dodatkowe informacje

- test płytkowy,
- szybki i bezpośredni,
- do samodzielnego wykonania,
- wykrywa bakterie boreliozy *B. garinii*, *B. afzelii*, *B. burgdorferi sensu stricto* i *B. spielmanii*.
- z przyrządem do usuwania kleszczy ze skóry (Kleszczykami).

### Producent

AcerbiPharma sp. z o.o.  
ul. Młodzieży 33  
30-829 Kraków