

Akutol spray do bezbolesnego usuwania plas

Cena: 20,05 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	AKUTOL
Opakowanie	35 ml
Postać	Aerozol
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Opatrunek
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Spray **Akutol** to doskonałe rozwiązanie do szybkiego, bezbolesnego usuwania plastra i opatrunku. Jest szczególnie zalecany dla dzieci i dorosłych prowadzących aktywny tryb życia oraz dla osób korzystających z plastrów hormonalnych, nikotynowych, pacjentów ze stomią czy cukrzycą.

Składniki

Hexametyldisiloxane, Butane, Propane, Isobutane, Cyclopentasiloxane.

Stosowanie

Skóra w obrębie plastra powinna być czysta i sucha przed użyciem sprayu. Plaster należy spryskać sprayem z odległości 10-15 cm od skóry, w celu jego nawilżenia. Odczekać 10-15 sekund i zerwać plaster szybkim ruchem. W przypadku plastrów nieprzepuszczalnych należy spryskać róg plastra i po kilku sekundach podnieść krawędź plastra. Następnie ponownie spryskać i zdejmować plaster partiami do całkowitego usunięcia.

Zastosowanie

Usuwanie plastrów kryjących i transdermalnych, opatrunków przyklejonych i innych wyrobów medycznych przyklejanych do powierzchni ciała (plastry nikotynowe, plastry kinesiotapingowe na bazie kleju akrylowego, elektrody EKG).

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie należy wdychać ani podpalać sprayu.

Ostrzeżenia

Chronić przed dostaniem się aerozolu do oczu i na błony śluzowe.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Uwagi

W przypadku ran przewlekłych, w celu zachowania higieny produkt powinien być stosowany tylko przez jednego pacjenta.

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi, ciepłem, gorącymi powierzchniami, iskrami, otwartym płomieniem oraz innymi źródłami ognia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Salus International Sp.z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice