

## Aparat do płukania oka APO/K 1 sztuka



Cena: 23,68 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	-
Producent	STANMARK PRZED.POL-ZAGR.
Rodzaj produktu	Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

### Opis produktu

#### Opis

Aparat do płukania oka APO został stworzony do przepłukiwania oczu czystą wodą w przypadku dostania się do nich obcego ciała. Jego zastosowanie może być kluczowe w sytuacjach nagłych zarówno w miejscu pracy, podczas podróży, jak i w gospodarstwie domowym, stanowiąc istotny element wyposażenia apteczki pierwszej pomocy. Ponadto, może być używany do leczniczego płukania oczu, na przykład z wykorzystaniem roztworów leków ocznych lub naparu z rumianku.

#### Sposób użycia

- Odczepić wanienkę od pojemnika.
- Pojemnik napełnić 250 ml wody.
- Ponownie zamontować wanienkę na pojemnik, zdjąć pokrywkę.
- Pochylić głowę i przyłożyć szczelnie krawędzie wanienki do oczodołu.
- Ściskając dłońią pojemnik spowodować wypływ wody i przepłukanie zaprószonego oka do momentu usunięcia ciała obcego.
- Po użyciu aparat przepłukać, osuszyć i umieścić w woreczku PE.

#### Ważne wskazówki

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

#### Uwagi

- Zabieg można wykonywać samodzielnie lub przy pomocy drugiej osoby.
- W każdym przypadku zaprószenia oka, niezależnie od doraźnego przepłukania, należy poddać się kontroli lekarskiej.

#### Producent

STANMARK  
Obrońców Modlina 3  
Kraków



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943