

Aquamer Sensitive Aeroszol do nosa, 50 ml



Cena: 25,13 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatok
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 ml
Postać	Aeroszol
Producent	KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K.
Przeznaczenie	Alergia, Katar
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka

Opis produktu

Opis

Aquamer Sensitive to aeroszol do nosa, który polecany jest dla osób z zaburzoną prawidłową funkcją śluzówki nosa oraz do codziennej pielęgnacji jamy nosowej. Produkt przywraca naturalną zdolność do samooczyszczania nosa i prawidłową produkcję śluzu, co zapewnia ochronę przed przesuszeniem i mechanicznym podrażnieniem. Aeroszol jest szczególnie skuteczny w przypadku osób, które mają problemy z nawilżeniem i oczyszczeniem nosa.

Wskazania

Aquamer Sensitive to aeroszol do nosa przeznaczony do codziennej higieny nosa oraz do łagodzenia różnych dolegliwości związanych z zaburzeniami błony śluzowej nosa. Produkt jest polecany dla osób z alergicznym nieżytem nosa, zaburzeniami dróg oddechowych spowodowanymi infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, suchą i podrażnioną błoną śluzową nosa oraz dla osób ze skłonnością do przesuszenia błon śluzowych w czasie podróży lub przebywania w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach. Aquamer Sensitive może być również stosowany przed podaniem leków kortykosteroidowych do nosa, w celu złagodzenia objawów długotrwałego używania kropli obkurczających śluzówkę, przed użyciem kropli do nosa w celu przepłukania jamy nosowej oraz do łagodzenia podrażnień skóry wokół nosa spowodowanych częstym używaniem chusteczek. Produkt może również pomóc w łagodzeniu małych ran lub owrzodzeń w okolicy nosa.

Składniki

1 ml aeroszol zawiera 9 mg soli morskiej z Morza martwego, Ekstrakt z aloesu, Wodę oczyszczoną; dla większego bezpieczeństwa mikrobiologicznego zastosowano środek konserwujący - Chlorek benzalkoniowy, który zabezpiecza wyrób przed zanieczyszczeniem.

Stosowanie

- Niemowlęta i dzieci poniżej 1. roku życia: 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie.
- Dorośli i dzieci powyżej 1. roku życia: 1-2 rozpylenia do każdego otworu nosowego kilka razy dziennie.



Przeciwwskazania

Nie należy stosować Aquamer Sensitive w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, po upływie terminu ważności wyrobu medycznego oraz jeśli opakowanie jest uszkodzone. Ważne jest przestrzeganie tych zaleceń, aby uniknąć potencjalnych niepożądanych skutków ubocznych i zapewnić skuteczność produktu.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.