

# Baby Boom Test ciążowy strumieniowy 1 sztuka



Cena: 8,70 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	BABY BOOM
Opakowanie	1 sztuka
Postać	test
Producent	PASO-TRADING SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

## Opis produktu

### Opis

Test ciążowy **Baby Boom** to produkt medyczny przeznaczony do samodzielnego użytku w domu. Jego skuteczność wynosi 99% i umożliwia wykrycie podwyższonego poziomu hormonu gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w moczu już po 7 dniach od potencjalnego dnia zapłodnienia.

Działanie testu opiera się na reakcji pomiędzy hCG w moczu kobiety w ciąży a monoklonalnymi przeciwciałami anti-hCG obecnymi na teście immunochromatograficznym. Pozytywny wynik testu jest sygnalizowany przez pojawienie się barwnych pasków, co wskazuje na obecność podwyższonego stężenia hormonu, a tym samym na wczesną ciążę.

Test ciążowy Baby Boom jest bardzo czuły (25 mIU/ml) i precyzyjny. Aby uzyskać wiarygodny wynik, należy przestrzegać instrukcji zawartych na opakowaniu.

### Zastosowanie

- Wykrywanie obecności gonadotropiny kosmówkowej hCG w ludzkim moczu we wczesnej diagnostyce ciąży.
- Wyrób medyczny do użytku domowego.

### Sposób użycia

- Przed rozpoczęciem użycia zapoznaj się z instrukcją i przygotuj minutnik.
- Po usunięciu foliowego opakowania skieruj pasek absorpcyjny testu na kilka sekund bezpośrednio na strumień moczu.
- Jeśli nie możesz utrzymać strumienia moczu przez kilka sekund, możesz umieścić mocz w czystym i suchym pojemniku, a następnie zamoczyć w nim 2/3 paska absorpcyjnego na 10 sekund.
- Po ~5 sekundach trzymania paska absorpcyjnego pod strumieniem moczu należy zakryć pasek absorpcyjny plastikową nasadką.
- Następnie połóż test na płaskiej powierzchni, aby widzieć okno testowe.
- Od tego momentu zacznij mierzyć czas.
- Kiedy mocz zostanie wchłonięty, w oknie testowym w miejscu linii kontrolnej C powinnaś zobaczyć różową linię, która kontroluje działanie testu.
- Dokładny wynik można odczytać w oknie testowym w 5 minucie.



#### Przeciwwskazania

- Nie używać po terminie ważności.
- Nie używać ponownie. Test jednorazowego użytku.
- Nie stosować, jeżeli torba zabezpieczająca jest uszkodzona lub otwarta.
- Nie dotykać membran wewnątrz okienek.

#### Ostrzeżenia

- Po otwarciu torebki należy natychmiast wykonać test. Zbyt długie działanie otaczającej wilgoci może uszkodzić test.
- Przed użyciem należy sprawdzić czy test jest wyposażony w pipetę i pojemnik na mocz.
- Przechowywać w temperaturze 4-30oC.

#### Producent

NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY CO. LDT