

# Compeed Extreme Wyrób medyczny plastry na pęcherze na piętach dla aktywnych średnie 5 sztuk



Cena: 28,70 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COMPEED
Opakowanie	5 sztuk
Postać	plaster
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Pęcherze
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Wskazania

natychniasztowa ulga w bólu,przeznaczony na bardzo bolesne pęcherze,20 %\* dodatkowej amortyzacji,przyspiesza gojenie,pozostaje na miejscu,\*W porównaniu z Compeed Plastry na pęcherze średnie

### Składniki

plastry hydrokolidowe

### Stosowanie

Jak stosować Plastry Compeed na pęcherze, extreme:

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę przed użyciem. Miejsce z pęcherzem nie może być tłuste od kremów czy olejków.
2. Usunąć warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.
3. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra.
4. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).
5. Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.

### Opis

Compeed Extreme Wyrób medyczny plastry na pęcherze na piętach dla aktywnych średnie 5 sztuk



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943