

Compeed Wyrób medyczny plastry na odciski średnie 10 sztuk



Cena: 26,21 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COMPEED
Opakowanie	10 sztuk
Postać	plaster
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odciski
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Wskazania

chronią przed uciskiem i otarciami, natychmiastowo uśmierza ból, pozostaje na miejscu

Składniki

plastry hydrokolooidowe

Stosowanie

Jak stosować plastry Compeed na odciski, średnie?

1. Przed użyciem plastra oczyścić i osuszyć skórę. Miejsce aplikacji nie może być tłuste od kremów czy olejków.
2. Usunąć górną papierową warstwę ochronną plastra, unikając dotyknięcia warstwy samoprzylepnej.
3. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał odcisk. Wygładź brzegi plastra.
4. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).
5. Aby osiągnąć najlepszy rezultat stosuj plastry Compeed do czasu, aż skóra całkowicie się zagoi.

To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.

Opis

Compeed Wyrób medyczny plastry na odciski średnie 10 sztuk