

Compeed Wyrób medyczny plastry na zrogowacenia średnie 6 sztuk



Cena: 26,21 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COMPEED
Opakowanie	6 sztuk
Postać	plaster
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odciski, Rogowacenie naskórka
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Wskazania

natychniast łagodzi ból, pozostaje na miejscu

Składniki

plastry hydrokolooidowe

Stosowanie

Jak stosować Plastry Compeed na zrogowacenia?

1. Zmiękczyć skórę, mocząc stopy w ciepłej wodzie, a następnie usunąć stwardniałą skórę ręcznikiem.
2. Oczyszczyć i osuszyć skórę.
3. Usunąć górną, a następnie dolną papierową warstwę plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.
4. Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał modzele.
5. Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu do kilku dni.
6. Powtarzaj zabieg, aż skóra całkowicie się zagoi.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.

Opis

Compeed Wyrób medyczny plastry na zrogowacenia średnie 6 sztuk



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943