

Corega Bio Formula Wyrób medyczny tabletki do codziennego stosowania 136 sztuk



Cena: 43,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	136 tabl.
Postać	tabl.rozpusz.
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

aktywna ochrona przed rozwojem bakterii, zabija 99,9% bakterii* będących przyczyną nieświeżego oddechu *podczas badań laboratoryjnych, system czyszczący 4 w 1, esencja mięty

Składniki

wodorowęglan sodu, kwas cytrynowy, karonian potasu (monosiarczan potasu), węglan sodu, nadtlenek węgla sodu, TAED, benzoesan sodu, PEG-180, laurylosiarczan sodu, kopolimer VP / VA, aromat, subtylizyna, guma celulozowa, CI 42090, CI 73015

Stosowanie

Instrukcja stosowania

1. Wrzucić tabletkę Corega do pojemnika lub szklanki z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można było w niej całkowicie zanurzyć protezę.
2. Po namoczeniu przez 3-5 minut wyczyścić protezę miękką szczoteczką.
3. Następnie dokładnie opłucz protezę pod bieżącą wodą. Pozostały roztwór niezwłocznie wylej.

Przeciwwskazania

OSTRZEŻENIE: Szkodliwy w przypadku połknięcia. Działa silnie drażniąco na oczy. Po bezpośrednim kontakcie rąk z tabletkami lub roztworem należy dokładnie umyć ręce. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeśli podrażnienie oczu nie ustępuje konieczna jest porada lub pomoc lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób narażonych na przypadkowe połknięcie tabletek lub roztworu. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. W razie wystąpienia podrażnienia: zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza. Zawiera OLEJEK MIĘTY PIEPRZOWEJ I SUBTYLIZYNĘ. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA:

Nie umieszczać tabletek Corega ani roztworu w jamie ustnej. Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Nie pić roztworu powstałego po rozpuszczeniu tabletek ani nie używać go do płukania jamy ustnej. Nie dotykać jamy ustnej ani oczu rękami mającymi uprzednio bezpośredni kontakt z tabletkami lub roztworem.

Producent

Haleon Poland sp. z o.o.

Ważne

Znaki towarowe są własnością lub są licencjonowane przez spółki z grupy GSK. 2021 Spółki z grupy GSK lub ich licencjodawcy.

Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1639

Opis

Corega Bio Formula Wyrób medyczny tabletki do codziennego stosowania 136 sztuk

Galeria

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.

Corega Bio Formula

Przewidziane zastosowanie: Tabletki do czyszczenia
protez zębowych
Podmiot prowadzący reklamę: Haleon Poland Sp z o.o.
Producent: Stafford-Miller (Ireland) Limited

HALEON

