

# Corega Ochrona Dziaśeł Krem mocujący do protez zębowych 40 g

Cena: 25,45 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	40 g
Postać	-
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.

## Opis produktu

### Wskazania

pomaga zapobiegać podrażnieniom dziąseł, poprawia komfort noszenia protezy zębowej, bez cynku

### Składniki

cellulose gum, petrolatum, calcium/sodium PVM/MA copolymer, paraffinum liquidum

### Stosowanie

Przed pierwszym użyciem kremu mocującego należy zapoznać się z dokładną instrukcją stosowania umieszczoną na ulotce wewnątrz opakowania.

#### Instrukcja Stosowania:

Krem mocujący do protez Corega Ochrona Dziaśeł stosuje się zarówno do protez zębowych całkowitych jak i częściowych.

Sposób aplikacji kremu:

1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku, niezbyt blisko jej krawędzi.
3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.
4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.

Sposób usuwania:

1. Przepłukać jamę ustną wodą.
2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.
3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.
4. Dokładnie oczyścić protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega a następnie opłukać wodą.

### Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.

#### **Opis**

Corega Ochrona Dziaśeł Krem mocujący do protez zębowych 40 g