

# Corega Pasta 2w1 do mycia protez zębowych i zębów miętowy smak 75 ml

Cena: 15,47 zł

## Opis słownikowy

|            |  |
|------------|--|
| Opakowanie | 75 ml  |
| Postać     | -  |
| Producent  | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O. |



## Opis produktu

### Wskazania

do protez zębowych i zębów, nie niszczy protezy + zawiera fluor

### Składniki

Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, Pentasodium Triphosphate, PEG-6, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Xanthan Gum, Titanium Dioxide, Cocamidopropyl Betaine, Carrageenan, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride, Sodium Hydroxide, Limonene, Zawiera: Sodium Fluoride (1450ppm fluoride)

### Stosowanie

Corega Pasta 2w1 została specjalnie stworzona do mycia protez zębowych i zębów. Postępuj zgodnie z instrukcją stosowania.

### Instrukcja Stosowania

Do stosowania powyżej 12 roku życia.

### Protezy zębowe

- Wyjmij protezę zębową z jamy ustnej
- Nałóż pastę Corega 2w1 na wilgotną, miękką szczoteczkę Corega 2w1
- Trzymając protezę zębową wmyj jej powierzchnię
- Dokładnie opłucz protezę pod bieżącą wodą przed ponownym włożeniem jej do jamy ustnej
- Umyj ręce po użyciu
- Rekomendujemy czyszczenie protezy zębowej przynajmniej raz dziennie.

### Zęby



- Wyjmij protezę zębową z jamy ustnej
- Używaj jak zwykłej pasty do zębów
- Rekomendujemy czyszczenie zębów dwa do trzech razy dziennie. Nie połykaj. Wypluj.

#### **Przeciwwskazania**

OSTRZEŻENIA - ZAWSZE PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI PODANYCH NA OPAKOWANIU.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie wystąpienia podrażnienia, przerwać stosowanie produktu. Nie stosować, jeśli zakupione opakowanie było otwarte. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik pasty.

#### **Producent**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

#### **Zawartość opakowania**

75

#### **Opis**

Corega Pasta 2w1 do mycia protez zębowych i zębów miętowy smak 75 ml