

# Cosmopor Silicone, opatrunek chłonny, samoprzylepny, jałowy, z silikonową warstwą kontaktową, 20 cm x 10 cm, 5 sztuk

Cena: 79,05 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	COSMOPOR
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Absorbujące, Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

**Cosmopor Silicone** to opatrunek samoprzylepny, który absorbuje wydzielającą się ciecz, posiada silikonową warstwę kontaktową i jest przeznaczony do opatrywania ran pooperacyjnych oraz większych skaleczeń. Nadaje się także do stosowania po zabiegach dezynfekcji i oczyszczania ran.

### Składniki

- Odporna na zachłapanie włóknina,
- Wiskozowa warstwa chłonna z włóknami superabsorbentu (SAF),
- Silikonowa warstwa kontaktowa rozmieszczona na całej powierzchni opatrunku.

### Zastosowanie

- Zaopatrywanie ran pooperacyjnych i urazowych z umiarkowanym wysiękiem.
- Odpowiedni dla osób z delikatną i wrażliwą skórą, w tym dzieci i osób starszych.

### Sposób użycia

- Wyjmij opatrunek ze sterylnej opakowania i usuń przezroczyste zabezpieczenie.
- Oczyszcz ranę, po czym naklej opatrunek w miejscu skaleczenia, tak by warstwa chłonna całkowicie pokrywała ranę.



- Zwróć uwagę, by powierzchnia klejąca nie miała kontaktu z uszkodzoną skórą.
- Wymieniaj w zależności od indywidualnych potrzeb, tak aby opatrunek zawsze pozostał czysty.

#### Ostrzeżenia

- Opatrunek do jednorazowego użytku, pojedynczy i sterylny.
- Nie należy używać ponownie ani nie przeklejać raz zastosowanego plastra, ponieważ może to doprowadzić do zakażenia.
- Jeżeli opatrunek jest mokry, należy zmienić plaster, postępując zgodnie z instrukcją użycia. W innym przypadku może wystąpić zakażenia lub podrażnienie.

#### Ważne wskazówki

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna saszetka ochronna nie została uszkodzona.
- Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować ponownie.

#### Uwagi

5 x samoprzylepny opatrunek chłonny o wymiarach 20 cm x 10 cm

#### Producent

Paul Hartmann AG  
Straße 12  
89522 Heidenheim, Germany