


# Criorectum Protect, czopki doodbytnicze, 10 sztuk

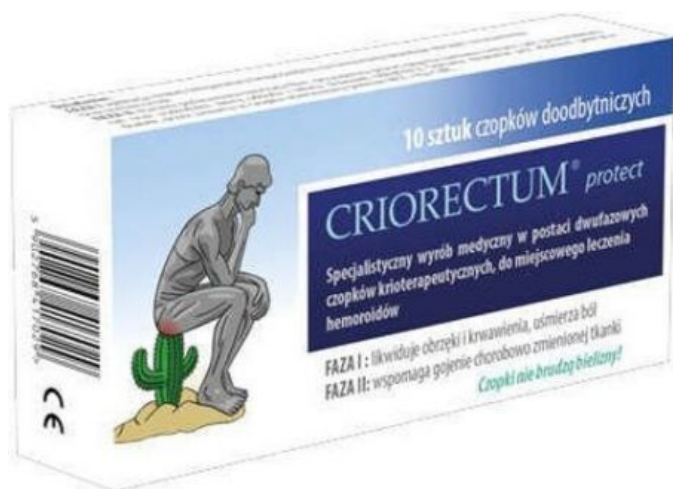

Cena: 25,01 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 szt.
Postać	Czopki
Producent	ABRH PLUS
Przeznaczenie	Ból, Hemoroidy, Krwawienie, Podrażnienie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

To specjalistyczny produkt medyczny tworzący dwufazowe czopków krioterapeutycznych, które są przeznaczone do miejscowego leczenia hemoroidów.

### Składniki

Woda, VIVAPUR MCG 811P.

### Zastosowanie

Hemoroidy i dolegliwości hemoroidalne, bolesne pęknięcia skóry w okolicach odbytu, szczelina odbytu, uszkodzenia błony śluzowej odbytnicy, po zabiegach chirurgicznych okolic odbytu.

### Sposób użycia

- Przed zastosowaniem czopki należy zamrozić w zamrażalniku lodówki w temp. -10 do -25 stopni Celsjusza. Czas zamrażania min. 1 godzina.
- Stosować doodbytniczo, niezwłocznie po wyciągnięciu z zamrażalnika, 1 czopek 2 razy dziennie.
- W przypadku odczuwania intensywnych objawów stosować przez okres 5 dni. Utrzymujące się dolegliwości lub ich nawrót są wskazaniem do wydłużenia kuracji o kolejne 5 dni.
- Blister z czopkami przed zamrożeniem należy wstrząsnąć, aby upłynnić masę polimerową, a następnie zamrozić w pozycji pionowej, ostrzem czopka do dołu.

### Przeciwwskazania

- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przed zastosowaniem czopki umieścić w lodówce na minimum 1 godzinę.