

# Durex Wyrób medyczny żel intymny wiśniowy 50 ml



Cena: 17,16 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	DUREX
Opakowanie	50 ml
Postać	Żel
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Nawilżanie okolic intymnych
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

## Opis produktu

### Opis

Durex Cherry Intimate Gel to aromatyzowany lubrykant na bazie wody, opracowany w celu łagodzenia dyskomfortu związanego z suchością pochwy, zapewniając nawilżenie, poprawiając poślizg i poprawiając komfort.

### Zastosowanie

- Lubrykant o wiśniowym smaku i aromacie przeznaczony do gry wstępnej i seksu oralnego, waginalnego i analnego.
- Odpowiedni do stosowania z prezerwatywami Durex wykonanymi z naturalnej gumy lateksowej, poliuretanowymi i poliizoprenowymi.

### Sposób użycia

- Zdejmij wieczko.
- Delikatnie naciśnij i rozprowadź na skórze w dowolnym miejscu.

### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

### Ostrzeżenia

- Żel intymny Durex Cherry nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie zawiera środka plemnikobójczego. Może spowalniać ruchliwość plemników.
- Unikaj kontaktu z oczami, uszkodzoną skórą lub ranami.



- Jeżeli wystąpi podrażnienie, zaprzestań stosowania. W przypadku, gdy podrażnienie nie przemija, zwróć się do lekarza o poradę.
- Skonsultuj się z lekarzem jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub borykasz się z problemem ciągle utrzymującej się suchości pochwy.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd  
Dansom Lane  
HU8 7DS Hull, Wielka Brytania