

# Ektin krople do oczu 10 ml



Cena: 44,92 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	EKTIN
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	VALEANT SP. Z O.O. SP.J.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Nawilżające, Ochronne, Przeciwalergiczne, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Ektin to wyrób medyczny w postaci kropli do oczu na alergię bez konserwantów. Przynoszą ulgę zaczerwienionym i podrażnionym oczom.

### Składniki

Kwas hialuronowy 0,24% (w postaci hialuronianu sodu), Ectoin 2%, chlorek sodu, wodorotlenek sodu (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

### Zastosowanie

Wspomaganie leczenia i zapobieganie objawom alergicznego zapalenia spojówek.

### Sposób użycia

- Usunąć nakładkę ochronną z końcówki butelki.
- Umieścić kciuk na ergonomicznym wspieraniu dla kciuka, a dwa inne palce na dnie butelki.
- Odwrócić butelkę do dołu. Przed pierwszym użyciem pompki należy ją napełnić naciskając wspieranie dla kciuka 7 razy, do momentu pojawienia się pierwszej kropli.
- Odchylić nieznacznie głowę do tyłu. Przytrzymać butelkę w dogodnej pozycji nad okiem. Palcem wolnej ręki lekko odciągnąć dolną powiekę. Delikatnie nacisnąć wspieranie kciuka. Po zakropleniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, zamknij powiekę i powoli poruszaj gałką oczną. W razie potrzeby, można użyć drugiej ręki, aby mieć dodatkowe wsparcie i uzyskać większą dokładność.
- Aby zapobiec możliwemu zanieczyszczeniu roztworu, należy unikać kontaktu końcówki butelki z oczami lub palcami.
- Natychmiast po użyciu nałożyć nakładkę ochronną na końcówkę butelki.



#### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie należy dotykać powierzchni oka końcówką butelki, aby uniknąć ewentualnego urazu oka lub zanieczyszczenia roztworu.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

#### Ostrzeżenia

Ten wyrób może po podaniu wywoływać przemijające niewyraźne widzenie, co może mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

#### Producent

Bausch & Lomb GmbH  
Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlin, Niemcy