

Fixsin, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, 30 saszetek

Cena: 21,39 zł



Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	FIXSIN
Opakowanie	30 saszetek
Postać	Saszetki
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Infekcja, Katar, Zapalenie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Fixsin zestaw do płukania nosa i zatok zawiera substancję rozpuszczalną, która jest chlorkiem sodu. Ten zestaw jest przeznaczony do sporządzania roztworu, który jest stosowany do płukania nosa i zatok. Produkt działa poprzez udrażnianie i oczyszczanie nosa i zatok z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu.

Składniki

100% chlorek sodu.

Zastosowanie

Fixsin zestaw do płukania nosa i zatok może być stosowany w przypadku zapalenia zatok przynosowych, nieżyty nosa różanego pochodzenia oraz przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok w celu utrzymania higieny nosa i zatok.

Sposób użycia

Płukanie przeprowadzić 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz. Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania sprawdzić temperaturę wody. Wsypać zawartość saszetki do butelki. Butelkę napęlić przegotowaną wodą (o temperaturze ciała) do poziomu oznaczonego linią 240ml. Dokładnie zakręcić butelkę i potrząsać w celu rozpuszczenia substancji w wodzie. Przełożyć butelkę do otworu nosowego. Oddychać przez usta. Płynnym ruchem ścisnąć butelkę tak aby połowa roztworu dostała się do nosa i wpłynęła drugim otworem nosowym. Po chwili płukanie powtórzyć w drugim otworze nosowym wykorzystując pozostałą część roztworu. Nie połykać roztworu. Po zakończeniu płukania oczyścić nos poprzez wydychanie. Niewykorzystaną ilość roztworu wylać.



Ważne wskazówki

Zgodnie z informacją, zestaw do płukania nosa i zatok Fixsin nie powinien być stosowany przez osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub z infekcją ucha. Przed użyciem zestawu po odbytej operacji nosa i zatok, zaleca się skonsultować się z lekarzem, aby uzyskać odpowiednie wskazówki i zalecenia.

Należy również pamiętać, że leku Fixsin nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu, który jest jednym z jego składników.

Ważne jest również przestrzeganie zaleceń dotyczących płukania nosa i zatok. Nie należy używać wrzątku ani gorącej wody do sporządzania roztworu. Należy również unikać stosowania nieprzegotowanej wody z kranu. Zaleca się korzystanie z odpowiednio przegotowanej wody lub wody destylowanej, zgodnie z instrukcją obsługi zestawu.