

HIALEYE DUO krople do oczu 10 ml



Cena: 43,69 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HIALEYE
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Nawilżające, Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Krople do oczu **Hialeye Duo** to intensywnie nawilżający preparat, który nie tylko natychmiast przynosi ulgę, ale także zapewnia długotrwałe nawilżenie. Stworzony jest do łagodzenia umiarkowanych i ciężkich objawów zespołu suchego oka, oferując jednocześnie właściwości ochronne, antyoksydacyjne oraz wspomagające regenerację powierzchni oka. Co istotne, krople posiadają neutralne pH, nie zawierają środków konserwujących, co sprawia, że są odpowiednie dla osób o wrażliwych oczach, również dla tych noszących soczewki kontaktowe.

Dawkowanie

Stosować 1-2 krople do każdego oka, 1-3 razy dziennie.

Składniki

2,0% trehalozy i 0,25% hialuronianu sodu.

Zastosowanie

Objawy wywołane przez czynniki środowiskowe (np. suche powietrze, wiatr, dym, zanieczyszczenie powietrza, nadmierne światło) lub inne czynniki, takie jak długotrwałe używanie komputera, przebyte zabiegi okulistyczne, wiek, przebyte choroby, stosowanie niektórych leków oraz noszenie soczewek kontaktowych.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego lub po upływie daty przydatności do użycia (6 miesięcy po otwarciu).
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia



- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny powinien być używany tylko przez jedną osobę.
- Nie dotykać końcówką butelki powierzchni oka ani soczewki kontaktowej. Nie dotkać końcówki butelki palcami.
- Nie ścisnąć butelki z założoną zakrętką.
- Po zastosowaniu nie należy zakładać zakrętki, dopóki butelka nie nabierze oryginalnego okrągłego kształtu (w butelce przepływu powietrze zastępcze).
- W przypadku nieostrego widzenia bezpośrednio po zastosowaniu należy odczekać chwilę przed wystąpieniem do wykonywania czynności wymagających ostrości widzenia. Nieostrość widzenia powinna być jedynie łagodna i przejściowa.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów