

Hylo-Care krople do oczu 10 ml



Cena: 54,82 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	HYLO
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH
Przeznaczenie	Gojące, Nawilżające, Regenerujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Hylo Care wyrób medyczny to krople do oczu nawilżające i wspomagające leczenie uszkodzeń powierzchni oka. Sterylne krople do oczu nie zawierają środków konserwujących oraz fosforanów.

Składniki

Hialuronian sodu 1 mg/ ml, dekspantenol, bufor cytrynianowy, woda.

Zastosowanie

Do nawilżania i wspomagania leczenia uszkodzeń powierzchni oka powstałych np. w wyniku suchego oka lub będących następstwem zabiegów operacyjnych; zaczerwienienie, swędzenie, odczucie obecności ciała obcego, podrażnienie. oka

Sposób użycia

- Zwykle zakrapla się 1 kroplę do worka spojówkowego każdego oka 3 razy dziennie..
- Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu po powierzchni oczu,
- Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy,
- Zalecamy zakroplenie Hylo Care 30 minut po założeniu soczewek kontaktowych na oczy, w celu uniknięcia ewentualnych reakcji nietolerancji między środkiem do pielęgnacji soczewek a preparatem. Należy liczyć się z wystąpieniem smug na soczewkach, które jednak zwykle znikają po kilku mrugnięciach.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.



- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Zalecane jest zakropienie Hylo Care 30 minut po założeniu soczewek kontaktowych na oczy, w celu uniknięcia ewentualnych reakcji nietolerancji między środkiem do pielęgnacji soczewek a preparatem Hylo Care.

Producent

Ursapharm
Industriestraße
66129 Saarbrücken, Niemcy