

Irigasin Junior Wyrób medyczny zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok 32,4 g (30 x 1,08 g)

Cena: 17,00 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	30 saszetek
Postać	Saszetka
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka, Od 4 lat

Opis produktu

Opis

Irigasin Junior to wyrób medyczny stworzony do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok. Ten produkt pomaga w oczyszczaniu jamy nosa z zalegającej wydzieliny, bakterii, wirusów i alergenów, jednocześnie pielęgnując nos i zatoki. Preparat występuje w postaci proszku, który można wykorzystać do przygotowania roztworu izotonicznego, działającego nawilżająco na śluzówkę nosa, szczególnie w przypadku jej wysuszenia w wyniku długotrwałego przebywania w klimatyzowanych lub ogrzewanych pomieszczeniach.

Składniki

Chlorek sodu.

Zastosowanie

Ostre lub przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, nieżyt nosa w przebiegu infekcji lub alergii, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok, po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu, profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Sposób użycia

- Dzieci powyżej 4. roku życia: Płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.
- Dzieci mogą stosować wyrób samodzielnie jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.
- W celu przygotowania roztworu izotonicznego do butelki należy wsypać 1 saszetkę proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii (120 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.
- W celu przygotowania roztworu hipertonicznego do butelki należy wsypać 2 saszetki proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii (120 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorek sodu.
- Nie stosować w przypadku całkowitej blokady nosa, uniemożliwiającej wydostanie się roztworu.
- Nie stosować w przypadku infekcji lub uczucia zatkania ucha.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- W przypadku przebytej operacji ucha przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
- Po zakończeniu irygacji może pojawić się nieznaczny wyciek pozostałości roztworu z nosa przy pochylaniu.
- Nie stosować później niż na godzinę przed snem.
- Bezpośrednio po irygacji, przez godzinę dziecko nie powinno się kłaść, żeby pozostałości roztworu nie dostały się do ucha.
- Dzieci mogą stosować wyrób samodzielnie jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.
- Możliwość stosowania u dzieci poniżej 4. roku życia należy skonsultować z lekarzem.

Producent

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice.

Galeria

