

Kerato Vita, maść do oczu, 5 g

Cena: 31,20 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	KERATO VITA
Opakowanie	1 tub. po 5 g
Postać	Maść
Producent	PHARM SUPPLY SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Maść do oczu to preparat składający się z wazeliny, parafiny ciekłej, lanoliny, alkoholu cetostearylowego, wody oczyszczonej, witaminy A, witaminy E i D-pantenolu.

Składniki

Witamina A, witamina E, D-pantenol, wazelina, parafina ciekła, lanolina, alkohol.

Zastosowanie

W celu długotrwałej poprawy jakości filmu łzowego oraz intensywnej ochrony powierzchni oka.

Sposób użycia

1. Odkręcić nakrętkę, odchylić głowę do tyłu.
2. Delikatnie odciągnąć dolną powiekę, wycisnąć około 0,5 cm pasek maści do worka spojówkowego.
3. Powoli zamknąć oko, zakręcić tubkę.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie należy stosować w połączeniu z soczewkami kontaktowymi.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Ostrzeżenia

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Nie dotykać oka końcówką tuby, aby uniknąć zakażenia lub urazu oka.



- Końcówką tuby nie wolno dotykać innych przedmiotów ani części ciała.
- Ze względów higienicznych pojedyncza tuba Kerato VitA nie może być stosowana przez kilku pacjentów.
- W przypadku utrzymywania się dolegliwości ze strony oczu podczas stosowania Kerato VitA lub w przypadku ich ponownego wystąpienia od odstawienia maści należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą.
- Maść Kerato VitA nie jest przeznaczona do leczenia zakażeń oka jako jedyny środek, W przypadku podejrzenia zakażenia oka należy skonsultować się z okulistą.

Producent

OmniVision GmbH,
Lindberghstrasse 9,
82178 Puchheim,
Niemcy.