

LANCET GLUCOSENSE iXell 100 sztuk

Cena: 20,80 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 sztuk
Postać	-
Producent	GENEXO SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lancety do nakłuwacza **Glucosense/iXell**, 100 szt.

Wskazania

Do nakłuwania palca przy pobieraniu krwi włośniczkowej do pomiaru stężenia glukozy, przy użyciu glukometrów Glucosense lub iXell

Sposób użycia

Zawsze używaj lancetów tylko z nakłuwaczami Glucosense/iXell, zgodnie z instrukcją dołączoną do glukometru.

- Przed rozpoczęciem badania dokładnie umyj i osusz ręce.
- Około 20 s przed nakłuciem rozmasuj miejsce, z którego ma być pobrana krew.
- Miejsce nakłucia można przetrzeć 70% alkoholem. Przed nakłuciem alkohol musi całkowicie wyparować.
- Przekręć i zdejmij nakładkę nakłuwacza.
- Umieść lancet w prowadnicy i zdecydowanie wciśnij tak, aby lancet był stabilnie przymocowany.
- Odkręć dysk zabezpieczający ostrze.
- Aby zamknąć blokadę nałóż i przekręć nakładkę, aż do usłyszenia kliknięcia. Przy prawidłowo zamkniętej blokadzie, wskaźnik znajduje się w skrajnie prawym położeniu.
- Wybierz głębokość nakłucia skóry przekręcając regulowaną końcówkę tak, aby strzałka znajdująca się na niej wskazywała wybraną głębokość nakłucia (możliwe jest ustawienie 6 stopni głębokości nakłucia).
- Pociągnij ruchomy trzonek do momentu kliknięcia. W okienku pojawi się pomarańczowa kreska co oznacza, że nakłuwacz jest gotowy do użycia.

Pamiętaj, aby trzymać palce na nakłuwaczu, a nie na nakładce.

- Przyłóż końcówkę nakłuwacza dokładnie do bocznej części opuszki palca. Naciśnij przycisk zwalniający, słyszalne kliknięcie oznacza, że nakłucie zostało wykonane.
- Delikatnie rozmasuj obszar nakłucia, aby uzyskać wystarczającą ilość krwi. Pamiętaj, że nigdy nie można na siłę wyciskać kropli



krwi.

Przeciwwskazania

- Nie używać, jeśli tarcza zabezpieczająca została usunięta.
- Nie używać, jeśli opakowanie zostało uszkodzone.

Ostrzeżenia

- Wyrób jednorazowego użytku. Nie używać ponownie!
- Za każdym razem używaj nowego, sterylnego ostrza.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Ostrza i nakłuwacz są przeznaczone do użytku tylko przez jedną osobę.
- Nie wykonuj badania, jeśli ręce są zanieczyszczone kurzem, brudem, kremem lub tłuszczem.
- Unikaj zanieczyszczenia nakłuwacza i ostrza lancetu.
- Zużyte lancety wyrzucaj zgodnie z lokalnymi przepisami, ponieważ mogą stanowić źródło zakażenia.

Producent

TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION