

Mucovagin, żel dopochwowy, 25 g

Cena: 36,30 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	MUCOVAGIN
Opakowanie	25 g (tub. Alu)
Postać	Żel
Producent	VERCO
Przeznaczenie	Podrażnienie, suchość
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Mucovagin Żel to preparat medyczny zawierający drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy. Stworzono go z myślą o kobietach, które doświadczają suchości miejsc intymnych. Ten żel dopochwowy stanowi doskonałą alternatywę dla kobiet, dla których stosowanie globulek jest niekomfortowe lub potrzebują terapii na zewnętrzne okolice intymne.

Głównym składnikiem aktywnym Mucovagin Żelu jest kwas hialuronowy, naturalny składnik organizmu ludzkiego. Po aplikacji, kwas hialuronowy łącząc się z wilgotną wydzieliną błony śluzowej pochwy, tworzy żelową powłokę na jej powierzchni. Ta ochronna bariera zabezpiecza błonę, jednocześnie sprzyjając aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych. Film ochronny, który powstaje na powierzchni błon śluzowych, przywraca naturalną wilgotność, ułatwiając i przyspieszając procesy gojenia.

Składniki

Kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej kwasu hialuronowego), woda, glikol propylenowy, karbomer, trójetanoloamina.

Zastosowanie

- Regeneracja i nawilżenie okolic intymnych.
- Po porodzie naturalnym.
- Jako intensywnie nawilżający żel, ułatwiający kontakty intymne.
- Jako wsparcie w regeneracji błony śluzowej pochwy oraz zewnętrznych okolic intymnych.

Sposób użycia

- Produkt można używać wewnętrznie, miejscowo do pochwy lub zewnętrznie na okolice narządów płciowych. Przed użyciem i po użyciu żelu należy dokładnie umyć ręce.
- Wewnętrznie: Mucovagin żel należy aplikować wewnętrznie, w pozycji leżącej, za pomocą aplikatora dołączonego do opakowania, pozwalającego na zastosowanie odpowiedniej ilości żelu.
- Zewnętrznie: Nanieść niewielką ilość produktu (zawartość aplikatora) na okolice zewnętrznych narządów płciowych.



Zaleca się stosowanie żelu co 3 dni, wieczorem przed snem.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, przerwać stosowanie produktu.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosować żelu w trakcie menstruacji.
- Nie używać ponownie aplikatorów

Ostrzeżenia

- Zużyć w ciągu 1 miesiąca od pierwszego otwarcia.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Chronić przed słońcem i innymi źródłami ciepła.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

HELP SA
10, Valaoritou Str
Metamorfosi 144 52, Grecja