

## Opatr. HydroTac jał. 10 x 10cm 1 szt.



Cena: 10,95 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.

### Opis produktu

#### Opis

HydroTac jest kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Podstawą opatrunku jest pianka poliuretanowa. Warstwę opatrunku od strony rany stanowi hydrożel. Warstwa hydrożelu ma postać siatki, co pozwala na swobodne przejście wysięku do chłonnej warstwy piankowej. Pianka poliuretanowa szybko wchłania nadmiar wysięku rany i zamyka go w swojej strukturze. Nie oddaje go nawet pod wpływem terapii uciskowej. Hydrożel uwalnia wilgoć do rany utrzymując w niej wilgotne środowisko, sprzyjające ziarninowaniu i odbudowie nabłonka. Hydrożel zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany. Zmiany opatrunku przebiegają bezboleśnie. Warstwa hydrożelu daje opatrunkowi efekt początkowej przylepności „Initial Tack”. Dzięki temu zakładanie opatrunku staje się dużo prostsze. Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest wodoodporną folią poliuretanową, chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, nie utrudnia jednak przepływu powietrza i pary wodnej.

#### Działanie

Opatrunek HydroTac służy do zaopatrywania ran trudno gojących się, zarówno sączących jak i relatywnie suchych, w fazie ziarninowania i epitelializacji. Doskonale nadaje się do stosowania w połączeniu z terapią kompresyjną w przypadkach owrzodzeń podudzi pochodzenia żylnego