

Opatrunek ConvaMax Superabsorber, przylepny, 10 cm x 10 cm, 1 sztuka

Cena: 13,72 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

ConvaMax Superabsorber to opatrunek przylepny z superabsorbentem, stosowany na rany z dużym wydzielaniem płynu, takie jak owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny, rany stopy cukrzycowej i rany pooperacyjne z rozejściem się brzegów. Składa się on z trójwarstwowej konstrukcji, która umożliwia kontrolowanie wilgoci wokół rany, co sprzyja szybszemu gojeniu się. Warstwa chłonna skutecznie absorbuje wysięk, minimalizując ryzyko uszkodzenia skóry i maceracji.

Sposób użycia

- Po oczyszczeniu rany należy dobrać opatrunek o właściwym rozmiarze, aby zapewnić odpowiednie pokrycie rany i jej brzegów.
- ConvaMax Superabsorber, opatrunek z superabsorbentem, przylepny, może być stosowany zarówno jako opatrunek pierwotny, jak również jako opatrunek wtórny (pokrywający). W przypadku stosowania ConvaMax Superabsorber, opatrunku z superabsorbentem, przylepnego, jako opatrunku pierwotnego, należy zapewnić bliski kontakt opatrunku z łóżyskiem rany w celu poprawnej absorpcji płynu z rany. Biała warstwa kontaktowa powinna stykać się ze skórą, a niebieska wodoodporna wierzchnia warstwa powinna znajdować się z dala od ciała.
- W przypadku uzasadnionym klinicznie, opatrunek należy zabezpieczyć odpowiednio bandażem podtrzymującym, taśmami lub bandażem uciskowym.
- Częstotliwość zmiany opatrunku zależy od poziomu wysięku.
- Zdejmowanie opatrunku można ułatwić, zwilżając go roztworem soli fizjologicznej.
- Opatrunek należy utylizować jako odpady medyczne. W przypadku kontaminacji należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować tego produktu na rany suche lub z małym wysiękiem, oczy, błony śluzowe lub w jamach rany, ponieważ opatrunek puchnie podczas absorpcji.



- Opatrunku nie należy stosować na oparzenia trzeciego stopnia.
- ConvaMax Superabsorber, opatrunek z superabsorbentem, przylepny, nie powinien być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną alergią lub nadwrażliwością na opatrunek lub jego składniki.
- Krwawienia tętnicze i mocno krwawiące rany.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

- Nie używać ponownie.
- Nie należy używać opatrunku, jeśli jałowe opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
- Nie należy przecinać opatrunku, osłona musi pozostać nienaruszona.
- Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od światła.