

Opatrunek ConvaMax Superabsorber, przylepny, 20 cm x 20 cm, 1 sztuka

Cena: 49,03 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	CONVATEC POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

ConvaMax Superabsorber to jałowy opatrunek z superabsorbentem, który jest przylepny i przeznaczony do stosowania na ranach z dużym wydzielaniem płynu, takich jak owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny, rany pooperacyjne oraz owrzodzenia stopy cukrzycowej, gdzie występuje rozjęście się brzegów. Składa się on z warstwy włókniny z superabsorbentem, która przepuszcza powietrze, oraz warstwy wodoodpornej.

Sposób użycia

- Po oczyszczeniu rany należy dobrać opatrunek o właściwym rozmiarze, aby zapewnić odpowiednie pokrycie rany i jej brzegów.
- ConvaMax Superabsorber, opatrunek z superabsorbentem, przylepny, może być stosowany zarówno jako opatrunek pierwotny, jak również jako opatrunek wtórny (pokrywający). W przypadku stosowania ConvaMax Superabsorber, opatrunku z superabsorbentem, przylepnego, jako opatrunku pierwotnego, należy zapewnić bliski kontakt opatrunku z łóżyskiem rany w celu poprawnej absorpcji płynu z rany. Biała warstwa kontaktowa powinna stykać się ze skórą, a niebieska wodoodporna wierzchnia warstwa powinna znajdować się z dala od ciała.
- W przypadku uzasadnionym klinicznie, opatrunek należy zabezpieczyć odpowiednio bandażem podtrzymującym, taśmami lub bandażem uciskowym.
- Częstotliwość zmiany opatrunku zależy od poziomu wysięku.
- Zdejmowanie opatrunku można ułatwić, zwilżając go roztworem soli fizjologicznej.
- Opatrunek należy utylizować jako odpady medyczne. W przypadku kontaminacji należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przeciwwskazania

- Nie należy stosować tego produktu na rany suche lub z małym wysiękiem, oczy, błony śluzowe lub w jamach rany, ponieważ opatrunek puchnie podczas absorpcji.
- Opatrunku nie należy stosować na oparzenia trzeciego stopnia.
- ConvaMax Superabsorber, opatrunek z superabsorbentem, przylepny, nie powinien być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną



alergią lub nadwrażliwością na opatrunek lub jego składniki.

- Krwawienia tętnicze i mocno krwawiące rany.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

- Nie używać ponownie.
- Nie należy używać opatrunku, jeśli jałowe opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
- Nie należy przecinać opatrunku, osłona musi pozostać nienaruszona.
- Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od światła.

Producent

CONVATEC