

P.Teresa opaska elast.st.lokc. M



Cena: 23,72 zł

Opis słownikowy

| | |
|------------|---------------|
| Opakowanie | 1 szt. |
| Postać | - |
| Producent | SIGVARIS S.A. |

Opis produktu

Opis

Elastyczna opaska na staw łokciowy PT 0304 Pani Teresa to wyrób medyczny wielokrotnego użytku do wspomagania procesu leczenia oraz rehabilitacji. Wzmacnia i ochrania aparat więzadłowy stawu łokciowego. Może być używana zarówno profilaktycznie, jak i po operacjach i po urazach np. po stłuczeniach. Nadaje się do stosowania po zdjęciu opatrunku gipsowego, w przypadku wystąpienia krwiaka kaletki łokciowej i zapalenia kłykci kości ramiennej. Przy przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo-reumatycznych stawu łokciowego przyczynia się do zmniejszenia bólu i obrzęku. Opaska jest wysoce elastyczna. Wykonana została z delikatnych dla skóry materiałów z dodatkiem bawełny. Aby wybrać właściwy rozmiar, należy zmierzyć obwód ręki nad łokciem.

Zastosowanie

Elastyczna opaska do stosowania w profilaktyce oraz w trakcie leczenia i rehabilitacji stawu łokciowego, w celu złagodzenia bólu i obrzęku.

Sposób użycia

Opaskę wciągnąć przez dłoń na wysokość stawu łokciowego.
Stosować wyłącznie na nieszkodzoną skórę.

Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.

Dodatkowe informacje

- rozmiar M jest odpowiedni dla osób, u których obwód ręki nad łokciem wynosi 25-29 cm,
- wielokrotnego użytku,
- delikatna dla skóry,



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- elastyczna,
- długa,
- biała.