

P.Teresa opaska elast.staw skok. L



Cena: 24,36 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.

Opis produktu

Opis

Opaska na staw skokowy PT 0302 Pani Teresa ma postać taśmy zapinanej na rzep. Jest elastyczna i dobrze dopasowuje się do stopy. Może być noszona w obuwiu. To wyrób medyczny wielokrotnego użytku. Aby wybrać właściwy rozmiar, należy zmierzyć obwód nogi nad kostką.

Opaska wspomaga proces leczenia i rehabilitacji. Wzmacnia aparat więzadłowy stawu. Może być używana zarówno po urazach, i po zdjęciu gipsu, jak również w przypadku schorzeń reumatyczno-zwyrodnieniowych. Stosowana profilaktycznie chroni przed częstymi skręceniami stawu. Przyczynia się do złagodzenia bólu i obrzęku.

Zastosowanie

- jako wsparcie aparatu więzadłowego stawu skokowego, w celu ochrony np. przed częstymi skręceniami,
- po urazach,
- po zdjęciu gipsu,
- przy schorzeniach reumatyczno-zwyrodnieniowych,
- do złagodzenia bólu i obrzęków.

Sposób użycia

Odepnij rzep i zawij taśmę dookoła stopy, tak by krzyżowała się na przegubie stopy.

Następnie owiń wokół kostki i zapnij rzep.

Stosuj wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Dodatkowe informacje
Rozmiar L