

## P.Teresa opaska elast.staw skok. M skarpet



Cena: 32,86 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.

### Opis produktu

#### Opis

Elastyczna opaska na staw skokowy PT 0303 Pani Teresa ma dwuelementową konstrukcję - składa się z dzianej, bezszwowej skarpety i taśmy zapinanej na rzep. To wyrób medyczny wielokrotnego użytku odpowiedni do stosowania również w obuwu.

Opaska wspomaga proces leczenia i rehabilitacji stawu skokowego. Może być stosowana we wczesnej rehabilitacji po operacjach, złamaniach lub innych urazach, jak również po zdjęciu gipsu. Wzmacnia i stabilizuje aparat więzadłowy. Pomaga w zmniejszaniu obrzęku i łagodzeniu bólu. Aby wybrać właściwy rozmiar, należy zmierzyć obwód nogi nad kostką.

#### Zastosowanie

- we wczesnej rehabilitacji po operacjach, złamaniach lub innych urazach,
- po zdjęciu gipsu,
- w celu wzmocnienia i ochrony stawu, w szczególności podczas wysiłku fizycznego.

#### Sposób użycia

Skarpetkę należy wciągnąć na nogę tak, aby węższy ściągacz znajdował się na śródstopiu, a szerszy ściągacz powyżej kostki.

Na taśmie wzmacniającej odpiąć rzepy i nałożyć ją na staw skokowy, tak by skrzyżowała się na przegubie.

Końce taśmy owinąć wokół kostki i zapiąć rzepy.

Stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

#### Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.

#### Dodatkowe informacje

Rozmiar M



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943