

P.Teresa pas brzuszny uniwers. L (poporod)



Cena: 63,01 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SIGVARIS S.A.

Opis produktu

Opis

Pani Teresa uniwersalny pas brzuszny zapinany na rzep to wyrób medyczny odpowiedni do stosowania w celu wsparcia mięśni brzucha. Działa wzmacniająco na mięśnie brzucha i zapobiega opadnięciu trzewi jamy brzusznej. Stosowany po operacjach jamy brzusznej nie tylko ułatwia poruszanie się i podnoszenie, ale również redukuje ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej. W przypadku istniejących już przepuklin brzusznych (np. pępkowych, pooperacyjnych), powstrzymuje ich powiększanie się. W chorobach zwyrodnieniowo-zapalnych stawów łagodzi ból i ochrania. Może być również stosowany wspomagająco w leczeniu rwy kulszowej. Pas ma 30 cm szerokości i zapinany jest na rzep. Wykonany jest z delikatnych dla skóry materiałów, zawiera dodatek bawełny. Dzięki regulowanemu zapleciu można go dokładnie dopasować do ciała. To produkt wielorazowego użytku.

Zastosowanie

Ułatwia wstawanie i poruszanie się po operacjach jamy brzusznej oraz zmniejsza ryzyko powstania przepukliny. Istniejąca wcześniej przepuklina brzuszna, taka jak pępowina po operacji, aby zapobiec powiększeniu. Wspomaga mięśnie brzucha i przeciwdziała na opuszczaniu się trzewi jamy brzusznej.

Sposób użycia

Odepnij rzep i zawiń pas dookoła talii, obejmując brzuch i odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Zwróć uwagę, by zaplecie na rzep wypadło z przodu. Zapnij pas, regulując dopasowanie w obrębie zaplecia.

Ważne wskazówki

Właściwe użytkowanie urządzenia może wymagać porady lekarza. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest warunkiem prawidłowego działania produktu. Aby dobrać odpowiedni rozmiar, zmierz obwód nadgarstka. Przechowywać w suchym miejscu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wysokich temperatur. Unikaj silnego zabrudzenia. Prać ręcznie w 40°C z łagodnym środkiem piorącym (np. do prania wełny). Nie chlorować. Nie prasować.

Dodatkowe informacje

Rozmiar L



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943