

## Paski Accu-Chek ACTIVE, 50 sztuk

Cena: 39,37 zł



### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 pasków
Postać	Test paskowy
Producent	ROCHE DIAGNOSTICS GMBH
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

### Opis produktu

#### Opis

Paski testowe stworzone do indywidualnego pomiaru poziomu glukozy we krwi przy wykorzystaniu urządzeń Accu-Chek Active.

#### Zastosowanie

Do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Przydatne w samokontroli.

#### Sposób użycia

Nanoszenie krwi na pasek testowy:

- opcja: test paskowy w glukometrze: włóż pasek do glukometru. Przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego. Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.
- opcja: test paskowy poza glukometrem - przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od testu paskowego. Wsuń test paskowy w kierunku pokazanym przez strzałki do prowadnicy. Test musi wyczuwalnie "zaskoczyć" na swoje miejsce. Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.

#### Ważne wskazówki

Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

#### Producent

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.  
Dział Diabetologii,  
ul. Wybrzeże Gdyrńskie 6B,  
01-531 Warszawa.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943