

Pink Super czuły test ciążowy strumieniowy



Cena: 16,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.

Opis produktu

Wskazania

wykrywa ciążę 6 dni wcześniej, dokładność laboratoryjna 99 %, Konsumentki Lider Jakości 2021

Stosowanie

Przed wykonaniem badania zapoznaj się ze szczegółową instrukcją dołączoną do testu!

1. Wprowadź końcówkę testu pod strumień moczu na 10 sek.
2. Odczekaj 1-4 minut i odczytaj wynik
3. Jeden prążek - nie jesteś w ciąży
4. Dwa prążki - jesteś w ciąży

Przeciwwskazania

Przechowywać z dala od dzieci

Producent

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.

Ważne

Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1434

Opis

Pink Super czuły test ciążowy strumieniowy

Galeria

