

Plast.na odciski z kwasem salicylowym 8szt



Cena: 12,40 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LANGSTEINER
Opakowanie	8 sztuk
Postać	plaster
Producent	LANGSTEINER SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odciski
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Plastry na odciski marki **Langsteiner** wykorzystują recepturę opartą na naturalnych składnikach, takich jak wosk pszczeły żółty, lanolina, żywica świerkowa, kłącze kosaćca i balsam kopaiwa. Pełnią funkcję ochronną, zapobiegając dodatkowym urazom odcisków, redukując ucisk i osłaniając bolesne miejsca. Zawarty w nich kwas salicylowy działa łagodząco na odciski, pomagając w bezpiecznym i skutecznym ich usuwaniu. Produkt dostępny jest w opakowaniu zawierającym 8 plastrów.

Składniki

Kwas salicylowy, kwas mlekowy, lanolina, wosk pszczeły żółty, żywica świerkowa, kopolimer etylenu i octanu winylu, kłącze kosaćca, kompleks miedziowy chlorofilu, terpentyna, balsam kopaiwa, klej, włóknina, papier.

Zastosowanie

Plastry do łagodnego usuwania odcisków oraz zabezpieczania ich przed dodatkowymi urazami.

Sposób użycia

- Na czystą i suchą stopę nałożyć plaster tak, aby substancja czynna przylegała do odcisku.
- Stosować plastry do momentu, aż odcisk zostanie usunięty. Każdy plaster należy nałożyć na ok. 24 godziny.
- Po zakończeniu kuracji można usunąć środkową część odcisku stosując ciepłą kąpiel stóp z użyciem soli i mydła.
- Jeżeli w trakcie zabiegów skóra stanie się wrażliwa i pojawi się zaczerwienienie, poczekać z nałożeniem kolejnych plastrów.

Przeciwwskazania

- Nie nakładać plastra na okolice odcisku, jeżeli skóra jest podrażniona lub występują stany zapalne.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

Langsteiner Sp. z o.o.
ul. Białoprądnicka 16
31-221 Kraków