

Plomb-R 3 g (tubostrz.)

Cena: 45,01 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	3 g (tubostrz.)
Postać	-
Producent	TRIDENT S.A.

Opis produktu

Opis

Preparat **Plomb-R** zapewnia ochronę zęba przed nadwrażliwością na temperaturę, pokarmy oraz czynniki zewnętrzne, takie jak bakterie i resztki jedzenia. Dodatkowo chroni język i policzki przed ostrymi krawędziami szkliwa oraz zapobiega bolesnemu uciskowi na dziąsło w miejscu brakującego zęba.

Plomb-R jest przygotowanym do użycia preparatem na bazie tlenku cynku, który tymczasowo zabezpiecza ubytki w zębach. Nie wymaga mieszania przed użyciem.

Składniki

Tlenek cynku.

Zastosowanie

Preparat stomatologiczny oparty na tlenku cynku służy do samodzielnego wypełniania ukruszonego zęba lub ubytku po wypadnięciu plomby. Może być stosowany zarówno w zębach stałych, jak i mlecznych.

Sposób użycia

Wyciśnij niewielką ilość preparatu Plomb-R. Włóż do zęba, który wymaga wypełnienia i delikatnie zagryź. Pasta stwardnieje w kontakcie ze śliną. Odczekaj minutę, a następnie przepłucz usta ciepłą wodą, wypłuj. Przez co najmniej 15 minut nie zagryzaj i nie dociskaj wypełnienia w zębie. Jak najszybciej udaj się do stomatologa. W przypadku zębów, do których dostęp jest utrudniony, użyj szpatułki znajdującej się w opakowaniu. W przypadku bardzo dużych ubytków lub bólu, niezwłocznie zgłoś się do lekarza stomatologa. W warunkach niskiej temperatury otoczenia wyciśnięcie preparatu z aplikatora może być utrudnione. Wówczas najpierw rozgrzej aplikator w dłoni, a następnie ponownie spróbuj wycisnąć preparat.

Dodatkowe informacje

Nie zaleca się stosowania preparatu Plomb-R na odsoniętą miążgę ani w przypadku ogólnych stanów zapalnych miążgi. Po wyciśnięciu preparatu nie można ponownie umieszczać go w aplikatorze. Plomb-R nie przykleja się do zębów, służy jedynie do wypełniania ubytków. Nie należy stosować preparatu w sposób ciągły przez dłużej niż 28 dni. Po użyciu należy dokładnie zamknąć aplikator i przechowywać preparat w chłodnym i suchym miejscu.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943