

# RINOTAC spray 10ml



Cena: 34,94 zł

## Opis słownikowy

Część ciała	Nos
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	RINOTAC
Opakowanie	10 ml (but.z pomp.)
Postać	spray do nosa
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, Katar, Przeziębienie, suchość
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

Spray do nosa Rinotac został stworzony z myślą o łagodzeniu podrażnień oraz działaniu regenerującym i kojącym na błonę śluzową nosa. Dzięki zawartości wysokowartościowych składników, produkt ten pomaga w złagodzeniu objawów takich jak suchość, pieczenie, uczucie podrażnienia czy niekomfortowe odczucie w nosie.

Wartościowe składniki zawarte w Rinotacie działają wspomagająco w procesie regeneracji nabłonka nosa, pomagając błonie śluzowej w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Ponadto, działanie kojące sprawia, że produkt ten może być szczególnie pomocny w przypadku podrażnień spowodowanych przez różne czynniki, takie jak zanieczyszczenia środowiskowe, suche powietrze, alergeny czy długotrwałe korzystanie z innych preparatów do nosa.

### Wskazania

W profilaktyce i do uzupełniającego leczenia suchej lub pokrytej strupami błony śluzowej nosa, w przypadku:

- podrażnienia lub suchości błony śluzowej nosa (spowodowanych np. suchym lub zanieczyszczonym powietrzem),
- przeziębienia i kataru,
- kataru alergicznego,
- tworzenia się strupów w nosie,

### Składniki

Olej sezamowy, witamina E, mirystynian izopropylu, olejek bergamotowy, olejek goździkowy, przeciwutleniacz (BHT).

### Zastosowanie

Profilaktyka i leczenie uzupełniające suchej lub pokrytej strupami błony śluzowej nosa. Rinotac podaje się do nosa w celu nawilżenia błony śluzowej.

### Sposób użycia

Kilka razy dziennie, w zależności od indywidualnych potrzeb, po kilka dawek do każdego otworu nosowego. Zalecane 1 -3 dawki 2-3 razy



dziennie do każdego otworu nosowego.

**Przeciwwskazania**

W przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik produktu.

**Ważne wskazówki**

Spray do nosa Rinotac jest przeznaczony do łagodzenia podrażnień i działania regenerującego na błonę śluzową nosa. Ważne jest przechowywanie go w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu dostępowi do produktu. Jednakże, należy pamiętać, że Rinotac nie jest lekiem, a jedynie preparatem wspomagającym. W przypadku wystąpienia silniejszych dolegliwości bólowych lub braku poprawy po stosowaniu sprayu, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem. Warto wiedzieć, że spray ten jest odpowiedni zarówno dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 3. roku życia.