

## SALVEQUICK Małe S, 1 sztuka



Cena: 41,92 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SALVEQUICK
Opakowanie	100 sztuk
Postać	plaster
Producent	ORKLA CARE S.A.
Przeznaczenie	Otarcia, Rana
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

### Opis produktu

#### Opis

Dłonie stanowią jedną z obszarów ciała, które są szczególnie podatne na skaleczenia i otarcia. Ponadto, ze względu na ich dużą ruchomość oraz specyficzny kształt, opatrywanie ran na palcach rąk może stanowić wyzwanie.

#### Zastosowanie

Elastyczne plastry opatrunkowe na palce rąk z przeznaczeniem na rany o małym i średnim wysięgu wykorzystywane do pokrywania ran, skaleczeń i otarć.

#### Sposób użycia

- Oczyszczyć ranę pod bieżącą wodą lub za pomocą środka do oczyszczania ran.
- Przyklej odpowiedni plaster, aby zabezpieczyć ranę. Wielkość i kształt plastra należy dobrać indywidualnie, aby opatrunek znajdował się bezpośrednio na ranie, a warstwa z klejem poza nią.
- Zmieniaj plaster w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dobę.
- Upewnij się, że rana nie uległa infekcji.

#### Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie używać ponownie.



#### **Dodatkowe informacje**

Zestaw zawiera:

- 10 x 19 mm x 120 mm
- 4 x 39 mm x 66 mm
- 4 x 19 mm x 72 mm

#### **Producent**

CEDERROTH  
Polna 21  
Radzymin