

Scholl Spray do usuwania kurzajek i brodawek 80 ml

Cena: 65,74 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SCHOLL
Opakowanie	80 ml
Postać	Aerozol
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Przeznaczenie	Brodawki, Kurzajki
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 4 lat

Opis produktu

Wskazania

usuwanie już przy pierwszym użyciu*,oparty na metodzie zamrażania stosowanej przez lekarzy i specjalistów,odpowiedni dla dzieci powyżej 4 roku życia,*Pojedyncza aplikacja może być skuteczna, jednakże w przypadku kurzajek mogą być wymagane powtórne aplikacje

Składniki

Dimethyl Ether, Propane, Isobutane, Propelent: Hydrocarbon

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj instruktażową ulotkę.

Łatwy w użyciu - 5 prostych kroków

Przed użyciem należy uważnie przeczytać ulotkę. Przygotuj minutnik (np. kuchenny) do dokładnego mierzenia czasu gdyż należy przestrzegać czasu aplikacji, który jest ściśle określony by zachować bezpieczeństwo i skuteczność działania.

1. Zamontuj aplikator do białej plastikowej przykrywki, wciskając go do większego otworu zgodnie z rysunkiem.

2. Umieść puszkę z preparatem wylotem do góry na zabezpieczonym blacie stołu, bądź innej stabilnej i płaskiej powierzchni. Nie zbliżaj pojemnika do twarzy, innych części ciała bądź odzieży. Umieść białą, plastikową przykrywkę na puszcze zgodnie z rysunkiem, tak by aplikator znajdował się w przezroczystej plastikowej osłonie z boku pojemnika.

3. Trzymając puszkę w pozycji pionowej, jak na rysunku, naciśnij dozownik i przytrzymaj przez 5 sekund. Nie trzymaj pojemnika za plastikową osłonę.

4. Zdejmij plastikową przykrywkę z zamontowanym aplikatorem z puszki. Nie pozwól by płyn z aplikatora wyciekł na skórę i trzymaj pojemnik z daleka od oczu. Musisz odczekać 15 sekund, trzymając aplikator skierowany do dołu przed dotknięciem brodawki lub kurzajki. Dzięki temu cały płyn zgromadzi się na dole aplikatora i osiągnie temperaturę zamrażania optymalną dla efektywnej kuracji.

5. Upewnij się, że brodawka bądź kurzajka jest skierowana ku górze. Trzymając aplikator skierowany w dół należy delikatnie przyłożyć jego końcówkę do centralnej części brodawki bądź kurzajki na 30 minimum sekund, ale nie dłużej niż 40 sekund. Nie wolno trzeć



aplikatorem po powierzchni brodawki bądź kurczajki. Wyrzuć aplikator po każdym użyciu.

Produkt przeznaczony do usuwania kurczajek i brodawek

Skuteczny i łatwy sposób usuwania pospolitych brodawek i kurczajek oparty na metodzie natychmiastowego zamrażania. Po użyciu powstanie pęcherzyk. Kurczajka bądź brodawka powinna odpaść w przeciągu 10-14 dni, a na jej miejscu odrośnie nowa, zdrowa skóra. Nie należy aplikować preparatu na pojedynczą kurczajkę lub brodawkę więcej niż 4 razy.

Przeciwwskazania

PRZED UŻYCIEM UWAŻNIE PRZECZYTAĆ ULOTKĘ DOŁĄCZONĄ DO PRODUKTU.

Scholl i diabetycy

Ten produkt NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY przez diabetyków i osoby ze słabym krążeniem krwi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Składniki: Dimethyl Ether, Propane, Isobutane. Ten produkt nie może być stosowany przez diabetyków oraz osoby z zaburzeniami krążenia. Nie należy stosować u dzieci poniżej 4 roku życia. Produkt nie jest odpowiedni dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią. Używać wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Zawsze stosować z aplikatorami dostarczonymi przez producenta w oryginalnym opakowaniu. Niewłaściwe użycie produktu może powodować oparzenia, bliznowacenie zdrowych tkanek oraz ślepotę. Unikać kontaktu z oczami. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie.

Producent

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Zawartość opakowania

80

Opis

Scholl Spray do usuwania kurczajek i brodawek 80 ml