

# SIKATRIS Silikonowy plaster na blizny 5cm

Cena: 27,45 zł



## Opis słownikowy

|                 |  |
|-----------------|--|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn   |
| Opakowanie      | 1 sztuka   |
| Postać          | Plastry  |
| Producent       | BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.  |
| Przeznaczenie   | Redukcja blizn, Regenerujące (odbudowujące), Rozjaśniające, Wygładzające |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny   |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla seniorów  |

## Opis produktu

### Opis

**Plastry Sikatris**, oparte na wyjątkowych właściwościach żelu silikonowego, reprezentują nowatorskie i efektywne podejście do profilaktyki oraz pielęgnacji różnych rodzajów blizn.

### Zastosowanie

Profilaktyka i pielęgnacji różnego rodzaju blizn: po cesarskim cięciu, operacjach kardiologicznych, abdominoplastyce, oparzeniach.

### Sposób użycia

Przed użyciem dokładnie umyć ręce. Delikatnie umyć mydłem bliznę i otaczającą skórę, spłukać ciepłą wodą. Ostrożnie osuszyć bliznę. Wyjąć plaster z opakowania. W razie konieczności przyciąć plaster do rozmiaru blizny zostawiając niewielki naddatek (przynajmniej 0,5cm z każdej strony blizny). Ostrożnie usunąć folię ochronną z plastra. Delikatnie przyłożyć stroną samoprzylepną, zaczynając od brzegu blizny. Dokleić do całej powierzchni blizny. Zaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem oraz osuszyć. Plastry silikonowe na blizny należy zmieniać co 3-5 dni, kiedy utraci właściwości przylegające do skóry, jednak najlepsze efekty można uzyskać przy wymianie plastra co 24 godziny.

### Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku stwierdzenia alergii na silikon. Nie stosować na rany otwarte, które nie są jeszcze całkowicie wyleczone, rany sączące, oparzenia, błony śluzowe, a także w przypadku chorób dermatologicznych uniemożliwiających stosowanie wyrobów na bazie silikonu.

### Ważne wskazówki

- Chronić przed źródłami ciepła.
- Nie stosować powtórnie.
- Nie używać tego samego plastra dłużej niż 7 dni.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.  
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna  
+48 500 623 943

**Dodatkowe informacje**

1 plaster 5cm x 30 cm.

**Producent**

Biovena Healt Sp. z o.o.,  
ul. Odrowęża 15,  
03-310 Warszawa.