

SILAURUM SILIKONOWY ŻEL NA BLIZNY 15 ml

Cena: 28,94 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	15 ml
Postać	Żel
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Redukcja blizn, Regenerujące (odbudowujące), Wygładzające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Silaurum to żel silikonowy z nanokoloidem złota, przeznaczony do użytku na różnego rodzaju blizn. Produkt można stosować zarówno w przypadku świeżych blizn, jak i tych już istniejących.

Składniki

Plisiloksany, cyklopentasiloksan, nanokolid złota, dwutlenek krzemu.

Zastosowanie

- Blizny różnego pochodzenia: pooperacyjne, pourazowe, pooparzeniowe, potrądzikowe.
- Preparat można stosować w leczeniu nowych, jak i już istniejących już blizn.

Sposób użycia

- Niewielką ilość żelu nanieść na umytą i osuszoną powierzchnię blizn i delikatnie wmasować. Pozostawić do wyschnięcia.
- W przypadku niecałkowitego wchłonięcia preparatu, nadmiar usunąć.
- Preparat stosować 2 razy dziennie, minimum 2 miesiące.
- Unikać kontaktu z oczami.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie stosować na niezagojone rany i błony śluzowe, stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.
- Nie stosować na nałożone wcześniej preparaty zawierające antybiotyki lub inne leki.



Ostrzeżenia

- Unikać kontaktu z oczami.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Solinea Sp. z o.o. Sp.K
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn