

SOPELEK 2 Aspirator do nosa aparat+10 jedn

Cena: 16,42 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	SOPELEK
Opakowanie	1 opakowanie
Postać	aspirator
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Oczyszczające, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Aspirator do nosa Sopelek 2 umożliwia usuwanie wydzieliny z nosa u małych dzieci, co pomaga przywrócić im swobodne oddychanie i poprawia komfort. Regularne oczyszczanie nosa może pomóc w zapobieganiu lub ograniczaniu infekcji w górnych i dolnych drogach oddechowych, takich jak zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc.

Zastosowanie

Dla dzieci i niemowląt do bezpiecznego usuwania wydzieliny i śluzu z nosa w przeziębieniach, zapaleniu zatok i schorzeniach, którym towarzyszy powstawanie wydzieliny.

Sposób użycia

Nałóż końcówkę aspiratora z jednorazowym filtrem absorbującym na cylinder główny aspiratora. Umieść ustnik w swoich ustach, a końcówkę z jednorazowym filtrem absorbującym w prawym lub lewym otworze nosowym małego dziecka. Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik. Powtórz czynności w drugim otworze nosa małego dziecka. Zdejmij zanieczyszczoną końcówkę z jednorazowym filtrem absorbującym i wyrzuć ją (opcjonalnie dopuszcza się wyparzenie zanieczyszczonej końcówki z zastrzeżeniem wymiany jednorazowego filtra absorbującego na nowy). Jeżeli oddychanie małego dziecka wydaje się bardzo utrudnione, zaaplikuj uprzednio do każdego otworu nosowego dziecka 3-4 krople soli fizjologicznej lub roztwór soli morskiej do stosowania do nosowego.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Producent

Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

40-273 Katowice