

# Sterimar Spray do nosa 100 ml



Cena: 31,17 zł

## Opis słownikowy

Część ciała	Nos
Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	STERIMAR
Opakowanie	100 ml
Postać	Aerozol
Producent	MERCK SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Katar, Podrażnienie, suchość
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

## Opis produktu

### Opis

**Sterimar Higiena Nosa** to izotoniczny roztwór wody morskiej w postaci wyrobu medycznego, który jest przeznaczony do codziennej nawilżającej higieny nosa dla dzieci i dorosłych. Działa poprzez delikatne nawilżenie błony śluzowej i zapobieganie jej wysychaniu, zwłaszcza w sezonie grzewczym oraz w klimatyzowanych pomieszczeniach. Dzięki swojemu działaniu, roztwór oczyszcza nos z drobnoustrojów, zanieczyszczeń takich jak kurz czy alergeny, pomaga rozrzedzić i usunąć śluz, co ułatwia oddychanie. Dodatkowo, produkt przywraca naturalne funkcje błony śluzowej nosa. Regularne stosowanie może również pomóc w zapobieganiu nawrotom infekcji górnych dróg oddechowych.

### Składniki

Fizjologiczny roztwór oczyszczonej wody morskiej 100%.

### Zastosowanie

- Do nawilżania i codziennej higieny nosa.
- W profilaktyce patologii nosa i uszu.
- Odpowiedni dla dzieci i dorosłych

### Sposób użycia

- Produkt może być aplikowany w każdej pozycji.
- Przed pierwszym użyciem należy uwolnić jedną dawkę w powietrze w celu uruchomienia systemu mikrodyfuzji.
- Delikatnie wprowadzić końcówkę aplikatora do nosa i nacisnąć podstawę aplikatora.
- Stosować od 2 do 6 aplikacji dziennie do każdego otworu nosowego.
- Może być stosowany do codziennej higieny nosa przez długi czas.



#### Ważne wskazówki

- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu dostępowi do produktu przez dzieci, co może zminimalizować ryzyko połknięcia lub innych niepożądanych zdarzeń.
- Należy chronić pojemnik pod ciśnieniem przed światłem słonecznym, aby uniknąć wpływu światła na stabilność i jakość produktu. Światło może wpływać na składniki chemiczne zawarte w produkcie i może skrócić okres przydatności do użycia.

#### Producent

SOFIBEL LABORATOIRE FUMOUEZ