

# SUTRICON Plastry silikonowe 5 sztuk

Cena: 72,02 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SUTRICON
Opakowanie	5 sztuk
Postać	Plastry
Producent	VERCO
Przeznaczenie	Redukcja blizn, Regenerujące (odbudowujące), Rozjaśniające, Wygładzające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Silikonowe plastry Sutricon to innowacyjne rozwiązanie medyczne, przeznaczone do redukcji widoczności zarówno świeżych, jak i dojrzałych blizn. Plastry skutecznie poprawiają wygląd i elastyczność blizn, rozjaśniają oraz wygładzają powierzchnię skóry, jednocześnie zmniejszając widoczność blizn. Dzięki swoim właściwościom, plastry silikonowe na blizny utrzymują odpowiedni poziom wilgotności w tkance bliznowatej. Dodatkowo, łagodzą nieprzyjemne doznania związane z procesem gojenia blizny, takie jak ból, swędzenie czy uczucie napięcia.

### Składniki

Żel silikonowy, elastyczna membrana poliuretanowa.

### Stosowanie

1. Silikonowe plastry Sutricon można stosować po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów.
2. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.
3. W celu dopasowania wielkości plastra do powierzchni blizny, możliwe jest jego docięcie w dowolny sposób.
4. Plaster należy zmieniać średnio co 3 do 5 dni, jednak najlepsze efekty uzyskuje się wymieniając plaster co 24 godziny. Plaster należy dociąć do wielkości blizny, z uwzględnieniem 5 mm marginesu z każdej strony. Najlepszy efekt uzyskuje się przy ciągłym noszeniu plastra przez 24 godziny. Nie należy używać tego samego plastra przez więcej niż 7 dni.

### Zastosowanie

- Podczas leczenia różnych rodzajów blizn, w tym pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych i innych.
- W zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu.



- W zmniejszaniu widoczności blizn świeżych i dojrzałych.
- Dla dzieci (już od 6. miesiąca życia) i dorosłych.

#### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Plastry wyłącznie do użytku zewnętrznego, miejscowo na skórę.
- Nie stosować na otwarte, niezagojone rany, uszkodzoną skórę, rany sączące, błony śluzowe, oparzenia.
- Nie stosuj jeśli w okolicach blizny występują odczyny alergiczne lub inne zmiany chorobowe.
- Unikaj kontaktu z oczami.

#### Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### Dodatkowe informacje

5 x plaster silikonowy 3 cm x 10 cm

#### Producent

Verco S.A.  
ul. Skwer Wyszyńskiego 5 lok. 6U  
01-015 Warszawa