

# SUTRICON Żel na blizny silikonowy 15 ml

Cena: 33,90 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SUTRICON
Opakowanie	15 ml
Postać	Żel
Producent	VERCO
Przeznaczenie	Redukcja blizn, Regenerujące (odbudowujące), Rozjaśniające, Wygładzające, Wyrównujące koloryt
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Żel silikonowy Sutricon, przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę z bliznami przerostowymi, keloidami, bliznami potrądzikowymi, poparzeniowymi i rozstępami, jest wyrobem medycznym. Produkt ten może również być używany w celu zapobiegania nieprawidłowemu bliznowaceniu ran zamkniętych oraz w łagodzeniu objawów związanych z bliznami. Żel silikonowy na blizny Sutricon jest odpowiedni do aplikacji na wszystkich ruchomych powierzchniach ciała, w tym twarzy.

### Składniki

Polisiloksany, dwutlenek krzemu.

### Stosowanie

Stosowanie żelu powinno rozpocząć się po całkowitym zagojeniu rany i po zdjęciu szwów. Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieś niewielką ilość preparatu i masuj ją kolistymi ruchami przez około 2 - 3 minuty. Rozcieraj bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosowanie żelu minimum dwa razy dziennie.

### Zastosowanie

- Codzienna pielęgnacja blizn pooperacyjnych, blizn poparzeniowych, blizn pourazowych, blizn potrądzikowych, rozstępów.
- Wspomagania leczenia blizn przerostowych i keloidów.

### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.



- Żel przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, miejscowo na skórę.
- Nie stosować na otwarte, niezagojone rany, uszkodzoną skórę.
- Nie stosuj jeśli w okolicach blizny występują odczyny alergiczne lub inne zmiany chorobowe.
- Unikaj kontaktu z oczami.

#### **Ostrzeżenia**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Ważne wskazówki**

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### **Producent**

Vercos S.A.  
ul. Skwer Wyszyńskiego 5 lok. 6U  
01-015 Warszawa