

SutriSept Płyn 250 ml



Cena: 49,39 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------------|--|
| Dla kogo | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Opakowanie | 250 ml |
| Postać | Spray |
| Producent | VERCO |
| Przeznaczenie | Antyseptyczne, Nawilżające, Oczyszczające, Ułatwiające gojenie |
| Rodzaj produktu | Wyrób medyczny |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów |

Opis produktu

Opis

SutriSept to nowoczesny płyn do antyseptycznego oczyszczania i przemywania ran oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Działa bezbolesnie, usuwając zanieczyszczenia z uszkodzonej skóry, co pomaga zapobiegać infekcjom i przyspiesza proces gojenia się ran i oparzeń. Formuła płynu jest także odpowiednia do antyseptycznego oczyszczania, zmiękczenia i usuwania wyschniętych materiałów opatrunkowych, bez ryzyka dodatkowego uszkodzenia rany.

Składniki

PHMB (Poliheksanid) 0,1%, poloksamer 188 1%

Zastosowanie

SutriSept płyn z atomizerem, 250 ml przeznaczony jest do:

- do antyseptycznego oczyszczania ran i oparzeń,
- irygacji i nawilżania ran,
- nawilżania opatrunków medycznych przed założeniem,
- nawilżania i dekontaminacji opatrunków przed usunięciem z rany,
- eliminacji patogennych mikroorganizmów z opatrunków.

Sposób użycia

Instrukcja oczyszczania rany:

- dokładnie oczyścić całą ranę i jej okolice produktem Sutrisept Płyn na rany
- rany głębokie z rozległą martwicą tkanek przemywać przez 10-15 minut (przez nałożenie mokrego opatrunku)
- w celu optymalnego oczyszczenia rany zaleca się jej moczenie przez co najmniej 15 minut za pomocą całkowicie zmoczonego kompresu
- nie należy rozcieńczać płynu

Stosowanie na opatrunki i bandaże:

- całkowicie namoczyć opatrunki i bandaże, które przywarły do powierzchni rany, płynem i odczekać 1 - 5 minut, aby zmiękły, po czym ostrożnie usunąć je z rany

Przeciwwskazania

- Produkt nie jest odpowiedni do stosowania w przypadku operacji chrząstek hialinowych i aseptycznych operacji stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym, nie można go również aplikować do oczu. W przypadku kontaktu płynu z aseptyczną chiząstką należy rt natychmiast przemyć roztworem Ringera lub fizjologicznym roztworem soli.
- Nie stosować jeżeli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.
- Nie stosować w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych.
- Nie stosować razem z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami, olejkami, enzymami itp. Substancje te należy dokładnie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem produktu.
- Nie stosować do płukania i przemywania otrzewnej.

Ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego na skórę.
- Produktu nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.
- Produktu nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników.
- Produktu nie wolno pić! Produktu nie wolno połykać!
- SutriSept Płyn na rany jest produktem gotowym do użycia.
- Produkt można podgrzać przez użyciem do temperatury ciała.

Producent

VercO S.A.
ul. Skwer Wyszyńskiego 5 lok. 6U
01-015 Warszawa