


Undofen Krioterapia kurzajki brodawki Wyrób medyczny 50 ml

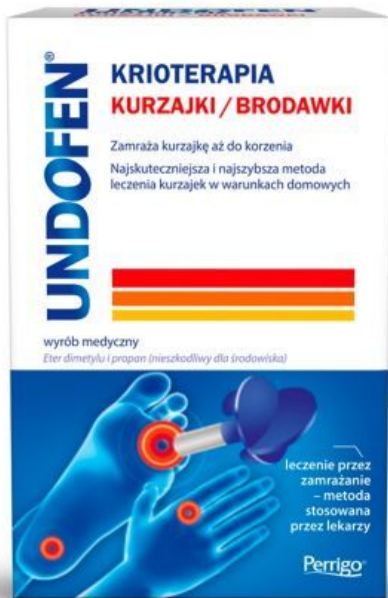

Cena: 64,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	UNDOFEN
Opakowanie	50 ml (12 aplik.)
Postać	Areozol
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Brodawki, Kurzajki
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 4 lat

Opis produktu

Wskazania

zamraża kurzajkę aż do korzenia, najszybsza i najskuteczniejsza metoda leczenia kurzajek w warunkach domowych, leczenie przez zamrażanie - metoda stosowana przez lekarzy

Stosowanie

Jak stosować Undofen Krioterapia?

Środek na brodawki Undofen Krioterapia usuwa różne rodzaje brodawek. O ile mniejsze kurzajki jest w stanie zlikwidować już po pierwszym zabiegu, o tyle duże mogą wymagać więcej niż jednego zastosowania preparatu. Jeżeli wymrażanie kurzajek nie powiedzie się za pierwszym razem i kurzajka nie zniknie po 10-14 dniach, zabieg można bezpiecznie powtórzyć. Ale uwaga! Aplikatora piankowego można użyć tylko raz, a następnie należy go wyrzucić.

Preparat na kurzajki Undofen Krioterapia nie może być stosowany w miejscach, gdzie skóra jest cienka lub wrażliwa, takich jak: twarz, szyja, pachy, piersi, pośladki i narządy płciowe. Nie powinien być stosowany na podrażnioną skórę oraz obszary zainfekowane, zaczerwienione lub wykazujące jakiegokolwiek oznaki stanu zapalnego. Preparatu nie można stosować na owłosionych brodawkach, znamionach, ciemnych pieprzykach oraz na skórze o zmienionym kolorze.

Przed leczeniem dobrze jest najpierw wymoczyć skórę w ciepłej wodzie przez około 5 minut, a następnie zetrzeć pilniczkiem zrogowaciały naskórek w okolicy brodawki. Aby wykonać zabieg, należy umieścić piankowy aplikator w uchwycie. Następnie wcisnąć trzymany za uchwyt aplikator do pojemnika z aerozolem na 3 sekundy i odczekać 20 sekund po nasyceniu pianki, aby dodatkowo zredukować temperaturę. Na koniec należy przyłożyć biały czubek aplikatora piankowego do brodawki.

- w przypadku brodawek zwykłych: przytrzymać aplikator przez 20 sekund
- w przypadku brodawek stóp: przytrzymać aplikator przez 40 sekund

Po przyłożeniu aplikatora piankowego do brodawki skóra może stać się biała i mogą wystąpić lekkie ból i pieczenie, będące reakcją na zamrażanie. Po odsunięciu aplikatora prawidłowy kolor skóry powróci. Uczucie pieczenia i niewielkiego bólu natychmiast się zmniejszy.

Zawartość opakowania

Undofen Krioterapia to zestaw, na który składają się:

- pojemnik z aerozolem o poj. 50 ml, zawierający nieszkodliwą dla środowiska mieszkankę eteru dimetylowego i propanu CE 0344,
- 12 aplikatorów piankowych jednorazowego użytku (do 12 zastosowań),
- uchwyt wielokrotnego użytku na aplikator piankowy,
- pilniczek wielokrotnego użytku CE
- ulotka informacyjna.

Wskazania

Preparat na kurczaki Undofen Krioterapia przeznaczony jest do usuwania kurczaków/brodawek w warunkach domowych.

Przeciwwskazania

Podobnie jak inne preparaty na kurczaki, tak i Undofen Krioterapia nie może być stosowany na skórze wrażliwej i podrażnionej. Wszelkie znamiona, ciemne pieprzyki, owłosione brodawki wykluczają zastosowanie preparatu. Wyrób medyczny na kurczaki Undofen Krioterapia nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i diabetyków. Nie może być stosowany u dzieci poniżej 4. roku życia. Osoby ze słabym krążeniem krwi przed użyciem preparatu powinny skonsultować się ze swoim lekarzem.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania

Ostrzeżenia

- Skrajnie łatwopalny aerozol.

Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed światłem słonecznym i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- Przechowywać z daleka od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Aplikator należy przykładać maksymalnie na 20 sekund (w przypadku brodawek (kurczaków) dłoni) lub na 40 sekund (w przypadkach brodawek stóp).
- Produkt nie jest przeznaczony dla diabetyków i kobiet w ciąży.
- Należy opróżnić przed utylizacją. Pozostałości należy utylizować jako odpady specjalne.
- Należy zapoznać się z treścią całej ulotki zawierającej instrukcję stosowania wyrobu medycznego Undofen Krioterapia i zachować ją do późniejszego użycia.

Jeżeli w opakowaniu brakuje ulotki, należy skontaktować się z farmaceutą, który udostępni kopię ulotki, bądź uzyskać pełne informacje na stronie internetowej www.undofen.pl

Producent

Perrigo Poland Sp. z o.o.

Zawartość opakowania

50



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Opis

Undofen Krioterapia kurzajki brodawki Wyrób medyczny 50 ml