

UniGel Procto Wyrób medyczny 10 sztuk

Cena: 42,92 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	UNIGEL
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopki
Producent	APOTEX NEDERLAND B.V.
Przeznaczenie	Ból, Hemoroidy, Krwawienie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

UniGel Procto to produkt medyczny w postaci czopków doodbytniczych, które są przeznaczone do wsparcia procesu gojenia zarówno ostrych, jak i przewlekłych ran błony śluzowej odbytu i odbytnicy. Te hipoalergiczne czopki zostały opracowane z myślą o pacjentach cierpiących na hemoroidy, pęknięcia, rany i uszkodzenia w okolicy odbytu.

Działanie czopków UniGel Procto opiera się na ich właściwościach kojących, które przyczyniają się do redukcji objawów takich jak krwawienie, pieczenie i swędzenie – typowe symptomy towarzyszące hemoroidom. Produkt medyczny dodatkowo wspomaga proces ziarninowania i regeneracji nabłonka, co przeciwdziała stanom zapalnym w okolicach rany. Czopki doodbytnicze są bezpieczne dla osób w każdym wieku, w tym także dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ich wydłużony kształt ułatwia aplikację, a składający się z sproszkowanego kopolimeru HEMA-HAS oraz bazy tłuszczowej Witepsol 25 W skład nie jest wchłaniany przez organizm.

Składniki

UniGel Procto to biały czopek o kształcie torpedy, zawierający sproszkowany kopolimer HEMA-HAS oraz bazę tłuszczową (Adeps solidus).

Sposób użycia

- W miejscu perforacji blistra należy oddzielić jeden czopek od całego opakowania, lekkim szarpnięciem otworzyć opakowanie jednostkowe i wyjąć czopek.
- Czopki wprowadza się do odbytnicy, o ile to możliwe po wypróżnieniu i podmyciu się.
- Czopek należy włożyć głęboko do odbytnicy, zaostrozonym końcem skierowanym w stronę odbytu, najlepiej w lekkim skłonie w przód.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
- Niewystarczająca długość odbytnicy (u dzieci do 3 miesiąca lub wcześniaków).

Uwagi

- Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze 15-25°C.
- Wyrób jednorazowy. Nie stosować ponownie.
- Produkt doodbytniczy. Nie wprowadzać do innych części ciała.

Galeria

