

Viscoplast Opti-Plast Junior Plastry okulistyczne 82 mm x 57 mm 10 sztuk



Cena: 27,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VISCOPLAST
Opakowanie	10 sztuk
Postać	plaster
Producent	3M POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Plastry okulistyczne **Opti-plast Junior** są przeznaczone do terapii okluzyjnej oczu, specjalnie zaprojektowanej w wersji dla dzieci. Ich celem jest wspieranie leczenia, na przykład zęza, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie

W terapii okluzyjnej oczu, np. w leczeniu zęza.

Sposób użycia

- Umyj i osusz skórę wokół oka.
- Usuń papier zabezpieczający plaster.
- Lekko przymknij powiekę, uważając, aby nie napinać mięśni i nie zamykać oczu.
- Plaster przyłóż centralnie na oko, węższą stroną do nosa i rozpocznij przylepianie od strony nosa w kierunku brwi.
- Nie naciągaj plastra ani skóry wokół oczu.
- Po umiejscowieniu plastra lekko dociśnij palcem część przylepną wokół oka.
- Zmień plaster w przypadku zabrudzenia bądź samoczynnego odklejenia się.
- Zdejmuj na noc.

Właściwości

Rozmiar: 62 × 50 mm

Ważne wskazówki

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.



- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.

Dodatkowe informacje

- cielisty kolor,
- hipoalergiczny klej,
- łatwy do przyklejenia,
- przepuszczający powietrze,
- o ergonomicznym kształcie.

Producent

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany