


Vita-Pos maść oczna 5 g

Cena: 31,85 zł

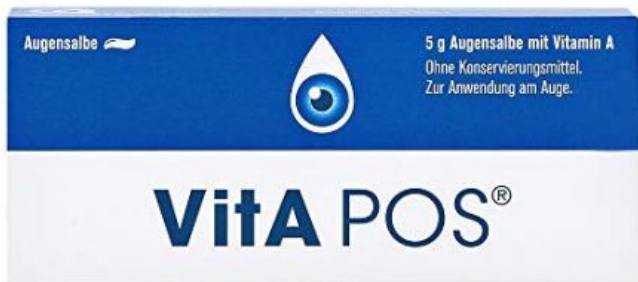

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	5 g
Postać	Maść
Producent	URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH
Przeznaczenie	Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

VitA POS to sterylna maść do oczu, będąca wyrobem medycznym, która działa ochronnie na powierzchnię oka i poprawia jakość filmu łzowego. Witamina A, obecna w składzie maści, stanowi naturalny składnik filmu łzowego, co pozwala na dobrą tolerancję preparatu, mieszając się z łzami. Maść zmniejsza uczucie suchości, pieczenia i zmęczenia oczu, ułatwiając mruganie.

Składniki

Palmitynian retinolu (witamina A), stała i płynna parafina, воск, biała wazelina.

Zastosowanie

Uczucie pieczenia, swędzenia i wysuszenia oczu spowodowane takimi czynnikami jak:

- wiatr,
- zimno,
- promienie słoneczne,
- dym,
- klimatyzacja,
- długotrwała praca przy komputerze,
- oglądanie telewizji,
- nocna jazda samochodem;

odczucie obecności ciała obcego.

Sposób użycia

- Odkręcić nakrętkę z tuby.
- Odchylić głowę lekko do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę używając palca jednej dłoni.
- Drugą dłonią przytrzymać pionowo tubkę ponad okiem i ściskając ostrożnie umieścić mały pasek maści w odchyłonym worku

spojówkowym.

- Powoli zamknąć oko i zamrunąć.
- Starannie zamknąć tubę nakrętką. W celu uniknięcia zanieczyszczenia należy unikać dotykania końcówką tuby zarówno oka, jak i innych powierzchni.
- Częstotliwość stosowania zależy od nasilenia dolegliwości i indywidualnych przyzwyczajeń.
- Może stanowić uzupełnienie stosowania nawilżających kropli do oczu i podaje się go wówczas jeden raz dziennie przed udaniem się na spoczynek.
- W poważniejszych przypadkach suchości oka można stosować trzy razy dziennie do każdego oka.
- W przypadku wrażenia, że dawkowanie jest niewystarczające należy poradzić się lekarza okulisty.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu,
- Nie stosować przy używaniu soczewek kontaktowych,
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Ostrzeżenia

- Przy stosowaniu maści ocznych należy unikać dotykania końcówką tuby zarówno oka, jak i skóry twarzy.
- Po pierwszym otwarciu można używać przez okres 6 miesięcy.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C).
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

URSAPHARM

Industriestrasse, 66129 Saarbrücken, Niemcy